


Manual do Equipamento

linha
infinity | 

Cadillac

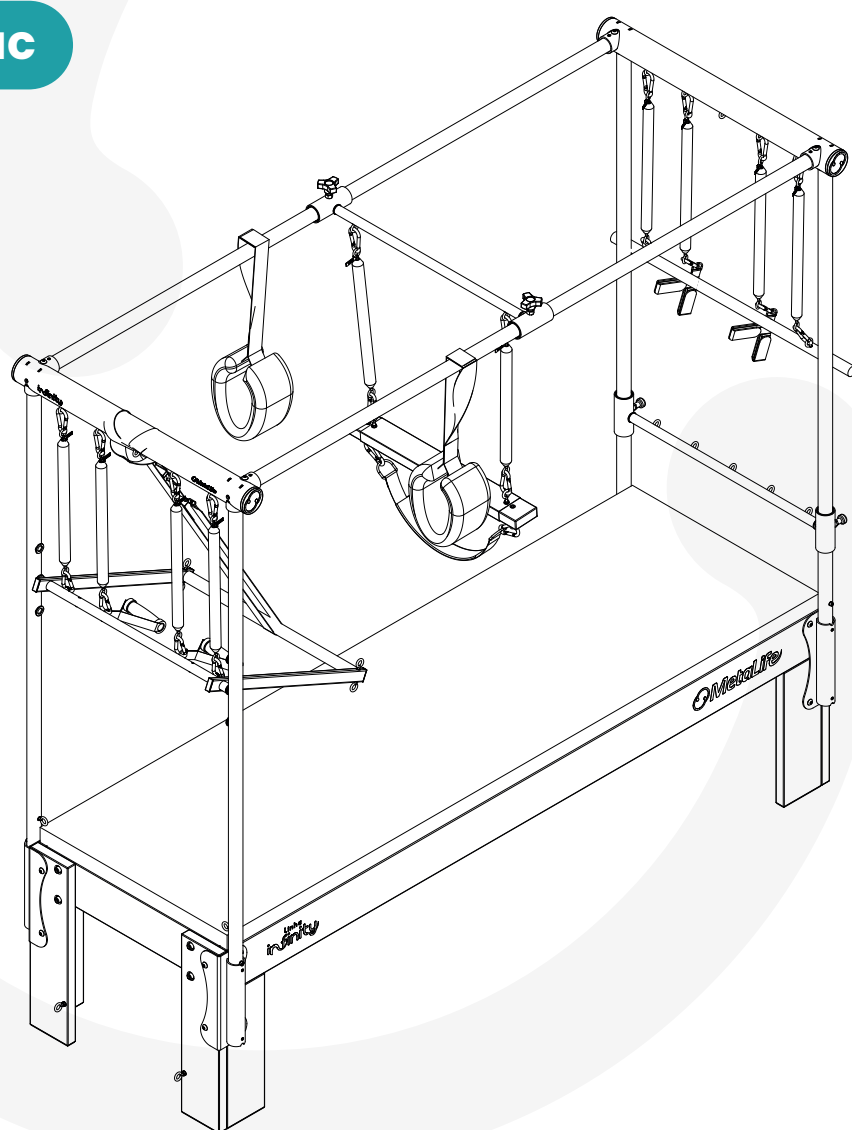

 **MetaLife**

Rev.00 15/07/25




APRESENTAÇÃO

- O Cadillac é um dos equipamentos mais versáteis e efetivos desenvolvidos para o método Pilates. Nos estúdios, é considerado um item fundamental. Este resistente equipamento oferece uma extensa gama de aplicações para todos os usuários, além de grande facilidade de adaptação. O Cadillac foi projetado para beneficiar pacientes em reabilitação física fisioterapêutica (mecanoterapia) e atletas.
- O método Pilates é amplamente utilizado para o tratamento de patologias. Os fisioterapeutas empregam a técnica com diferentes objetivos, como tratar problemas respiratórios, realizar tratamento ortopédico, tratar patologias que afetam as articulações e a coluna, bem como em pacientes com distúrbios neurológicos. O Cadillac é recomendado para otimizar os resultados da terapia, pois pode ser ajustado para pessoas de todas as idades, habilidades e limitações.
- Os exercícios no Cadillac desafiam os músculos profundos do abdômen, desenvolvem a flexibilidade da coluna, trabalham a mobilidade do ombro, fortalecem as costas e alongam todo o corpo. Sua estrutura em aço inox e carbono suporta os mais diversos movimentos do método Pilates, proporcionando eficiência e segurança na prática dos exercícios.
- Construído com madeira maciça de eucalipto provinda de reflorestamento, o Cadillac Metalife permite a desmontagem para facilitar o transporte.

Sumário

Especificações técnicas	07
Preparação para montagem	08
Conteúdo da embalagem	10
Montagem detalhada	12
Manutenção e segurança	38
Termo de garantia	44

Especificações Técnicas

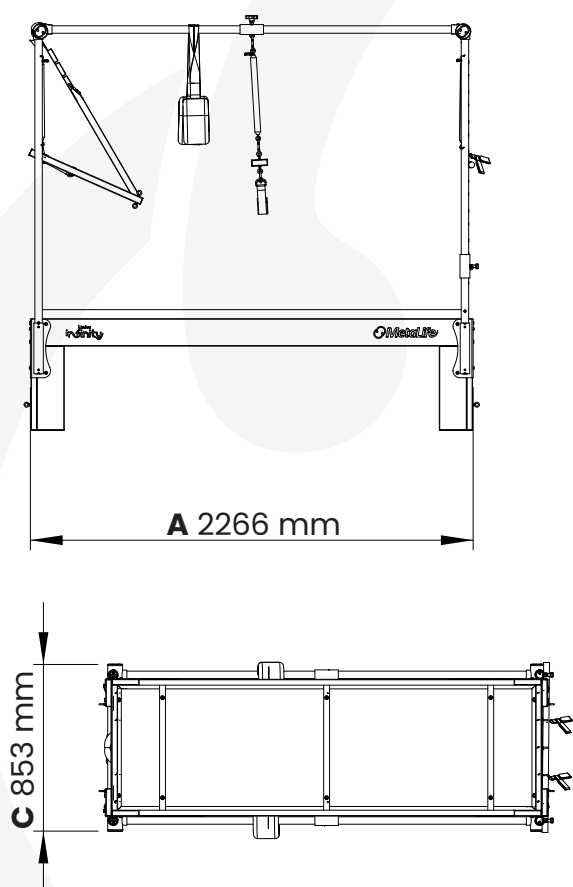

DIMENSÃO	Cadillac
A	2266mm
B	2123mm
C	853 mm



O peso do equipamento pode sofrer alterações em função da variação de densidade da matéria-prima empregada em sua fabricação.



O peso máximo suportado é de 140 kg. Não exceda esse limite para garantir a segurança e o funcionamento adequado do equipamento.

Preparação para Montagem

A Metalife dispõe de técnicos qualificados para a instalação dos equipamentos, mediante a cobrança de uma taxa de instalação. Porém, o serviço não inclui a preparação do local, que será de responsabilidade do consumidor. Caso prefira, o equipamento poderá ser montado pelo próprio consumidor, desde que siga atentamente as instruções detalhadas no manual.

O Reformer deverá ser instalado e utilizado em ambiente apropriado para a prática do pilates, atendendo a requisitos como piso nivelado e estável, proteção contra a incidência direta de raios solares e baixa umidade.



Seguindo este manual, a montagem completa do equipamento leva cerca de 30 minutos.



A montagem exige a participação de 02 pessoas para garantir a instalação correta.





Durante a montagem, siga as orientações deste manual para evitar danos ao equipamento, que serão de responsabilidade do cliente. Tenha cuidado ao manusear componentes e ferramentas. Caso haja dúvidas ou dificuldades, entre em contato.

Abaixo está uma lista com os passos importantes para iniciar a montagem:

- **Conferência dos Volumes:** Verifique se todos os volumes listados no manual ou nota fiscal foram recebidos e inspecione as embalagens para danos;
- **Abertura Cuidadosa da Embalagem:** Use ferramentas adequadas (estilete ou tesoura) para abrir a embalagem, cortando o mínimo necessário para evitar danos;
- **Organização das Peças:** Retire os componentes e os organize-os em uma superfície limpa e ampla. Utilize este manual para separar as peças e confira se todas as peças e ferramentas estão presentes;
- **Preparação da Área de Trabalho:** Coloque a embalagem no chão como base e garanta que o local de montagem esteja limpo e livre de objetos que possam danificar o equipamento.

Conteúdo da Embalagem

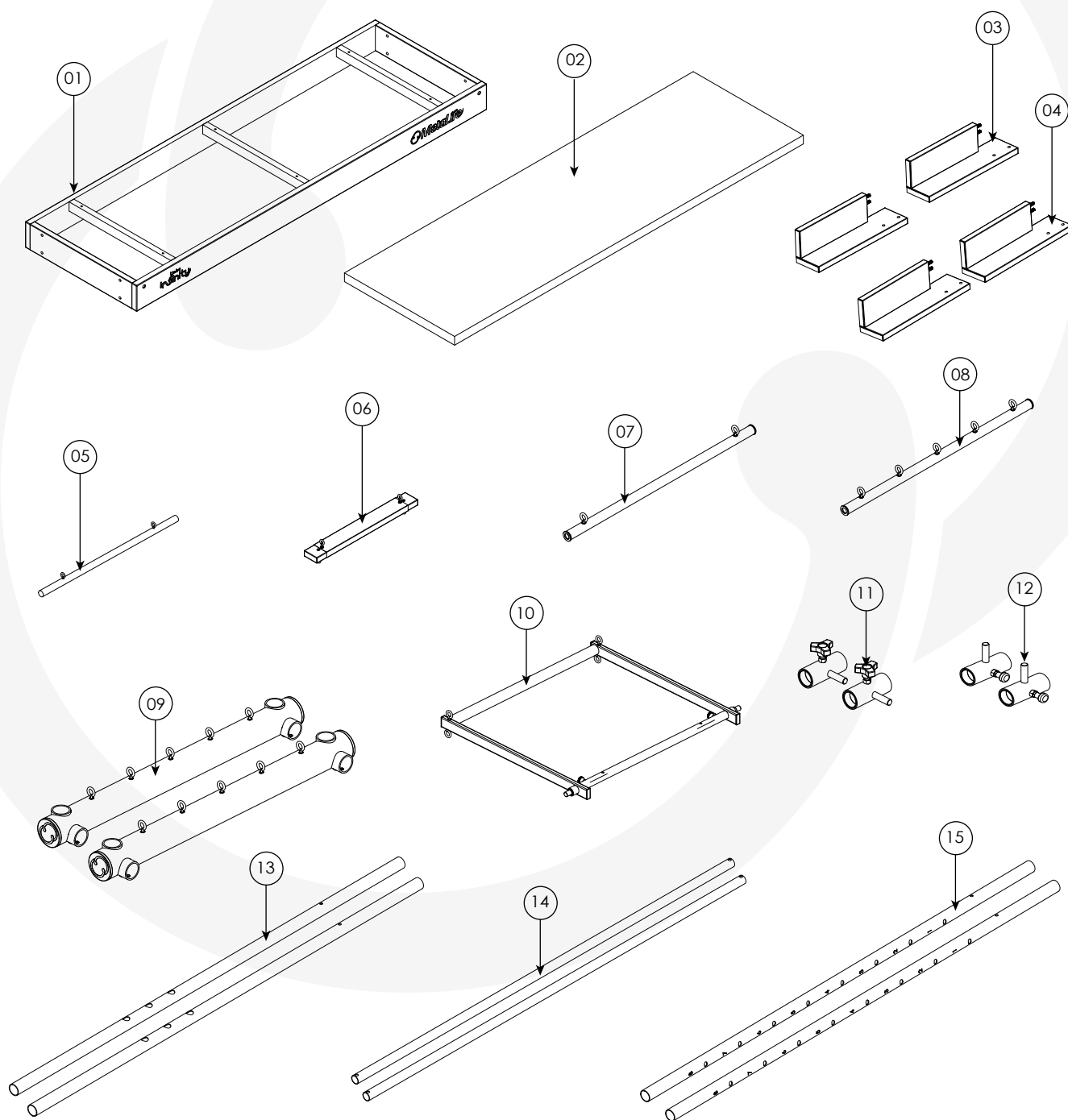

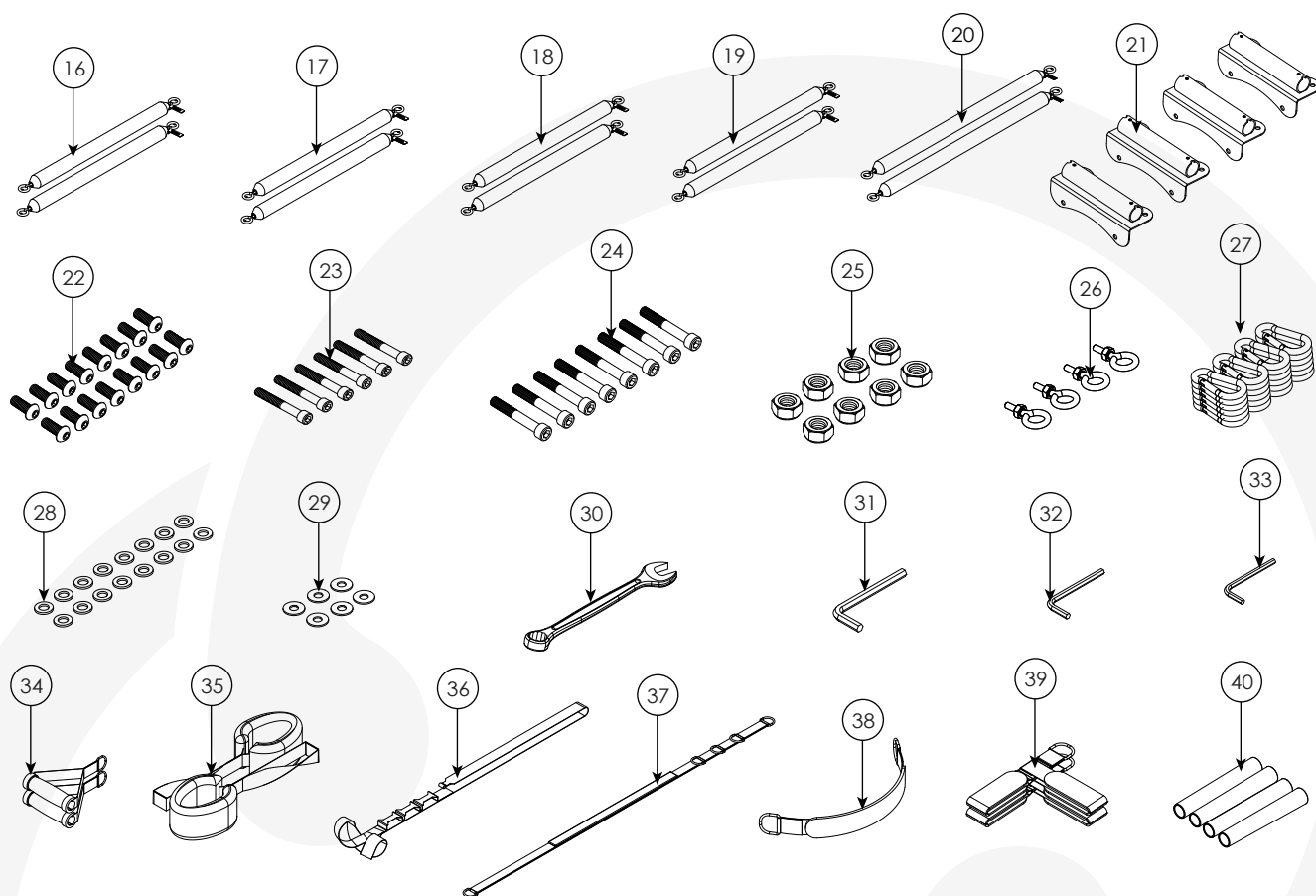


01	ESTRUTURA BASE	1
02	ESTOFADO	1
03	PE 3 CD	2
04	PE 4 CD	2
05	BARRA ROLLDOWN	1
06	ESTOFADO TRAPEZIO	1
07	TRAVESSA HORIZONTAL	1
08	TRAVESSA VERTICAL	1
09	TRAVESSA SUPERIOR	2
10	QUADRO AUTO-RETRATIL	1
11	MANCAL (MANIPULO MANUAL 3P)	2
12	MANCAL (MANIPULO AUTOMÁTICO)	2
13	COLUNA BARRA GIRATORIA	2
14	LONGARINA	2
15	COLUNA BARRA DESLIZANTE	2
16	MOLA VERMELHA	2
17	MOLA AZUL	2
18	MOLA PRETA	2
19	MOLA BRANCA	2
20	MOLA AMARELA	2

21	SUORTE COLUNA	4
22	PARAFUSO SI PN ZP 3/8X3/4	16
23	PARAFUSO SI CL ZP 1 /4X1 1/2	6
24	PARAFUSO SI CL ZB MI 0X70MM	8
25	PORCA SX AT ZB MI	8
26	OLHAL INOX	4
27	MOSQUETÃO TRAVA SIMPLES 7X70MM	24
28	ARRUELA LISA ZB 2X1 0,5X21 MM (M10)	16
29	ARRUELA LISA ZB 1,9X7X1 7MM	6
30	CHAVE COMBINADA 17MM	1
31	CHAVE ALLEN PRETA	1
32	CHAVE ALLEN BICROMATIZADA	1
33	CHAVE ALLEN PRATA	1
34	ALÇA MÃO	2
35	ALÇA FUZZY	2
36	ALÇA SEGURANÇA	1
37	ALÇA SUSTENTAÇÃO	1
38	ALÇA ABDOMEM	1
39	ALÇA PÉ/TORNOZELO	2
40	CAPA MOLAS	4

Montagem Detalhada

PASSO 01


Abra a embalagem e verifique os volumes do Cadillac. Você encontrará os seguintes itens: Estrutura Base (item 1), quadro retrátil (item 10), barra Rolldown (item 5) travessa superior (item 9) kit manipulós, conjunto colunas e o Kit Ferragem, no volume 2 você encontrará os seguintes itens: Estofado (item 2), estofado trapézio (item 6), capa molas (item 40). Conforme a imagem abaixo. Então, organize as peças de forma a facilitar a montagem. Recomenda-se realizá-la sobre a embalagem para evitar danos aos componentes. Consulte a página 11 para conferir os números dos itens que serão mencionados no passo a passo a partir daqui.



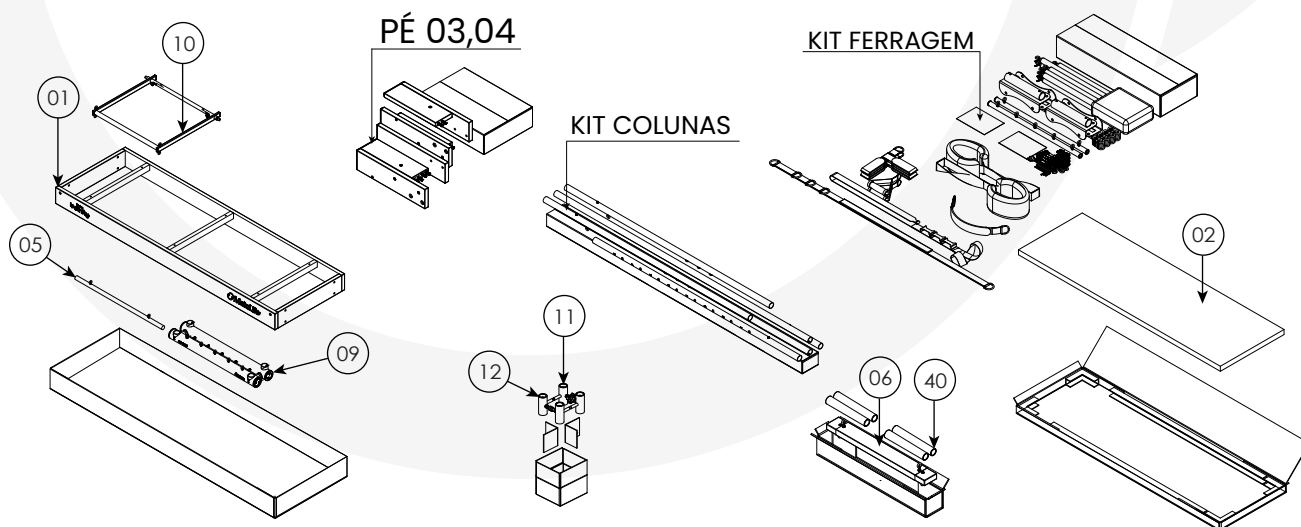


Ao abrir a embalagem do seu equipamento, tenha cuidado ao manusear objetos cortantes para evitar danos nas peças.

PASSO 02

Com o estofado disposto em superfície plana e com a parte estofada voltada para baixo, posicione a base (item 01) sobre o fundo do conjunto (item 02). Realize a fixação utilizando parafusos CL 1/4X11 3/4, (item 23) acompanhados de arruelas lisas (item 29), conforme indicado. Utilize a chave allen prata para o aperto, garantindo o correto travamento da estrutura.

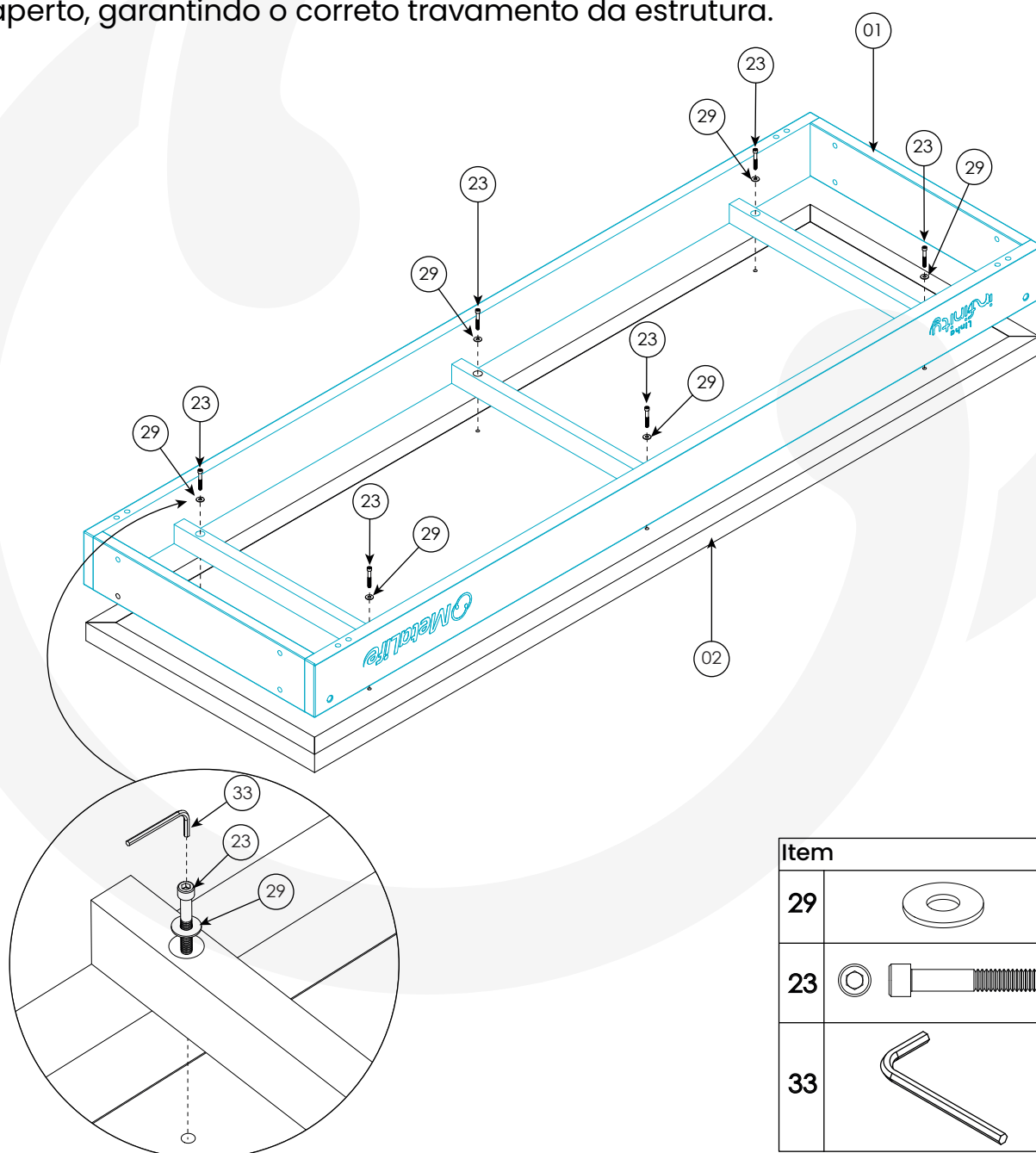

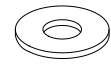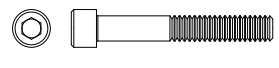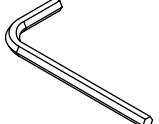
Item		Qtd.
29		06
23		06
33		01

PASSO 03

Com a estrutura base (item 01) ainda posicionada com o estofado voltado para baixo, alinhe os pés (itens 03 e 04) aos seus respectivos encaixes. Observe o correto alinhamento entre as cavilhas e os furos guia presentes na base. Pressione firmemente os pés até que estejam completamente encaixados na estrutura.




Atenção: A correta posição dos furos garante a estabilidade da montagem. Verifique se não há folgas visíveis após o encaixe.


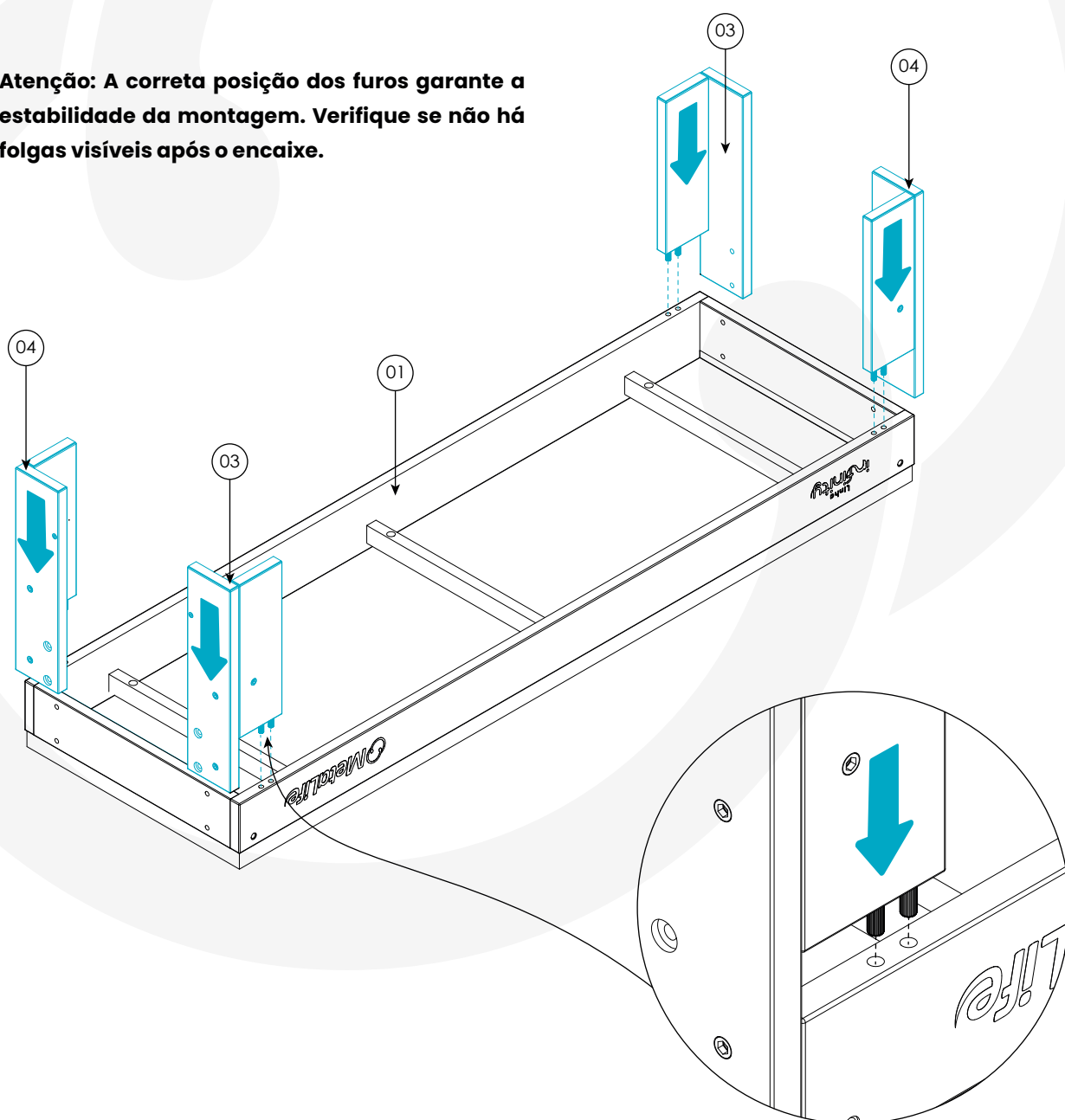





PASSO 04

Com os pés já encaixados na estrutura base, prossiga com a fixação utilizando o seguinte conjunto de componentes, nesta ordem: Parafuso SI CL ZB M10x70mm (item 24) Arruela lisa ZB 2x10,5x21mm (item 28) — uma de cada lado da estrutura de madeira Porca SX AT ZB M10 (item 25). Aperte os conjuntos com o auxílio de duas ferramentas: Chave Allen 5/16 preta e Chave combinada 17mm, garantindo firmeza e travamento adequado dos elementos.

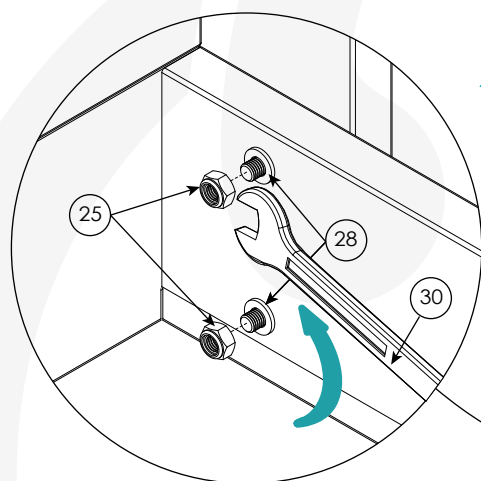


Importante: Certifique-se de que os parafusos atravessem completamente os furos até que todas as arruelas e porcas estejam corretamente posicionadas, como ilustrado nos detalhes ampliados da imagem.

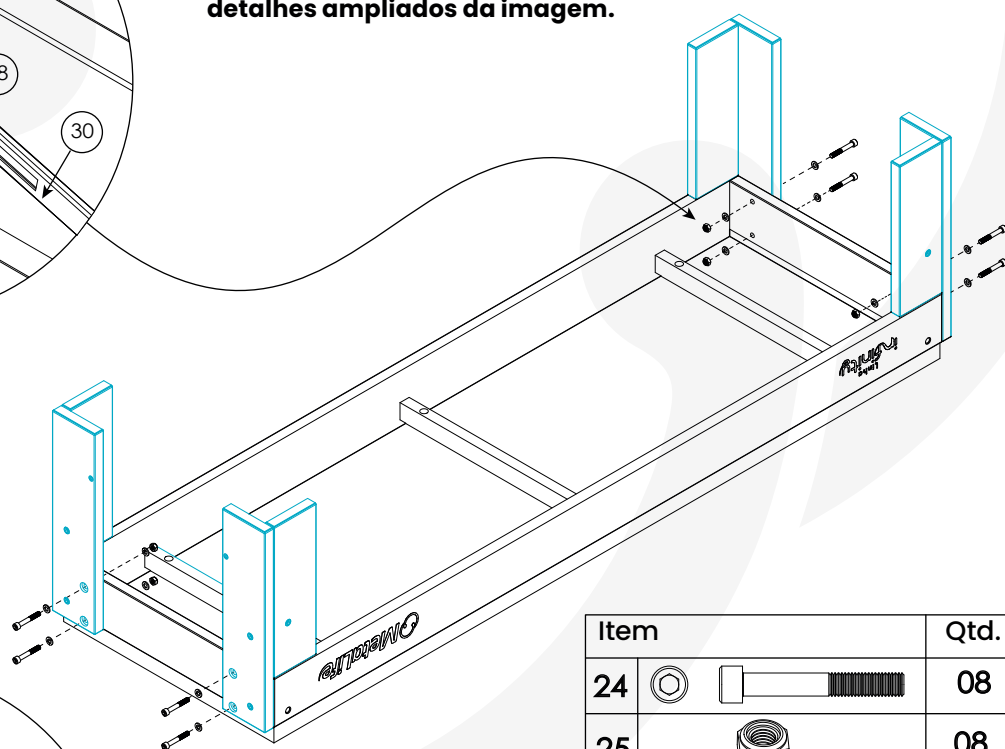
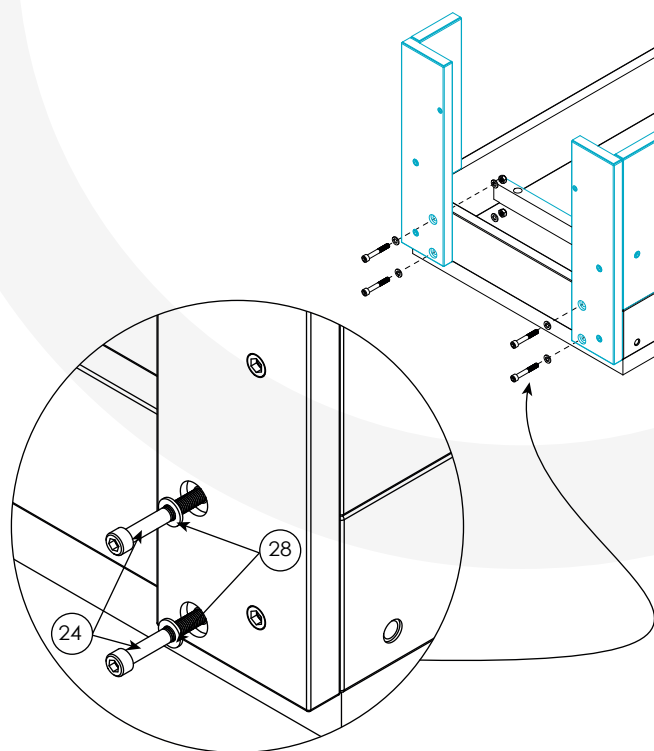


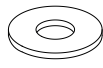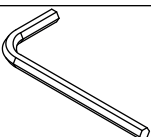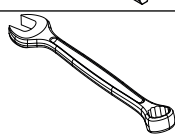Item		Qtd.
24		08
25		08
28		16
31		01
30		01

PASSO 05


Alinhe cuidadosamente os furos dos suportes (item 21) com os furos correspondentes nos pés e na estrutura. Fixe cada suporte utilizando: Parafuso SI PN ZP 3/8x3/4 (item 22). Chave Allen 7/32 bicromatizada (item 32). Realize o aperto dos parafusos até que os suportes fiquem firmemente fixados, como ilustrado no detalhe ampliado.

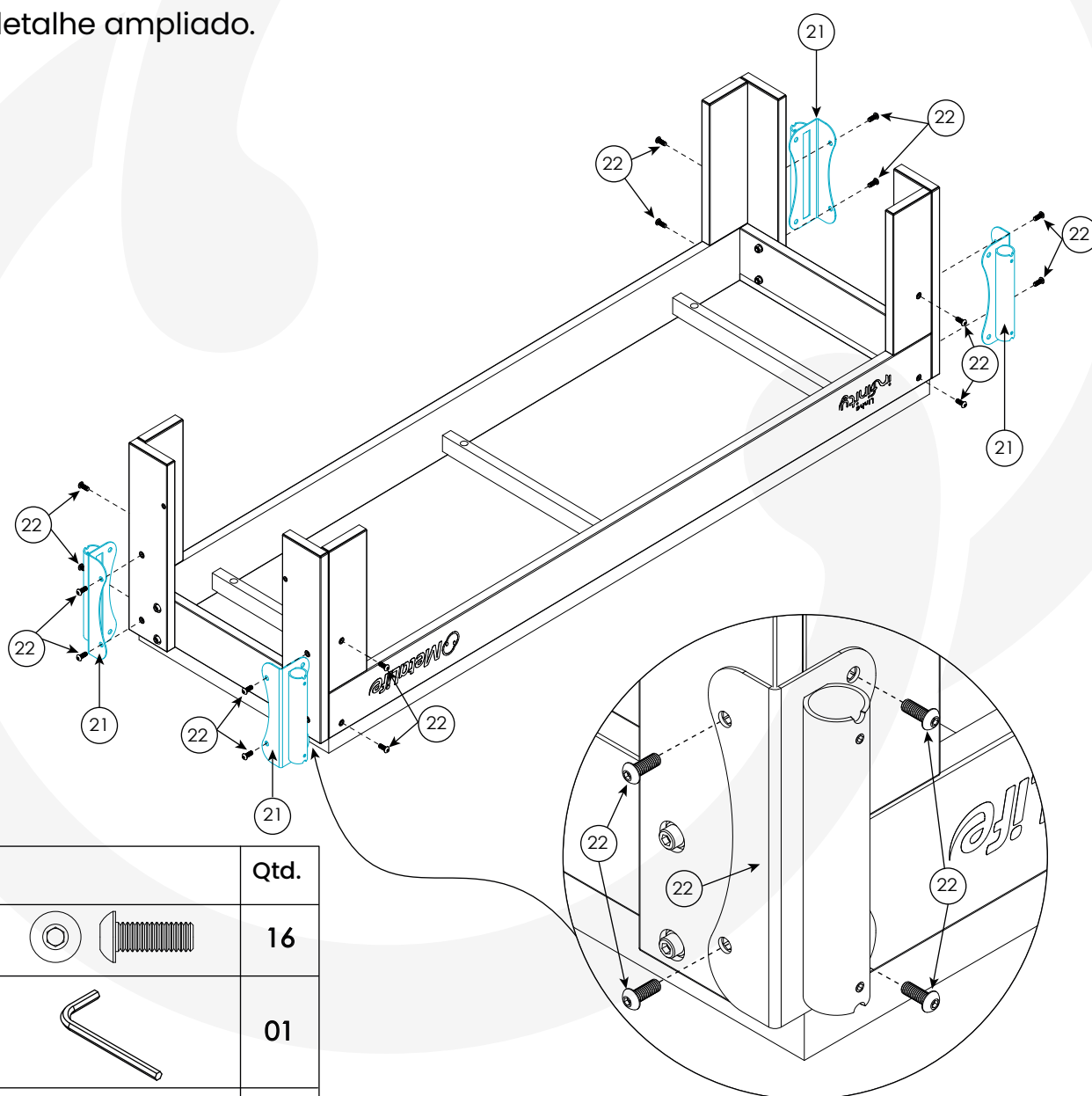


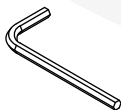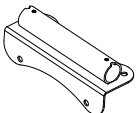Item		Qtd.
22		16
32		01
21		04

PASSO 06


Rosqueie manualmente um olhal (item 26) em cada pé da estrutura. As porcas já vêm pré-aplicadas no próprio olhal, facilitando a montagem. Após o encaixe manual, finalize o aperto utilizando a chave combinada 17mm (item 30), conforme mostrado na ampliação do desenho.

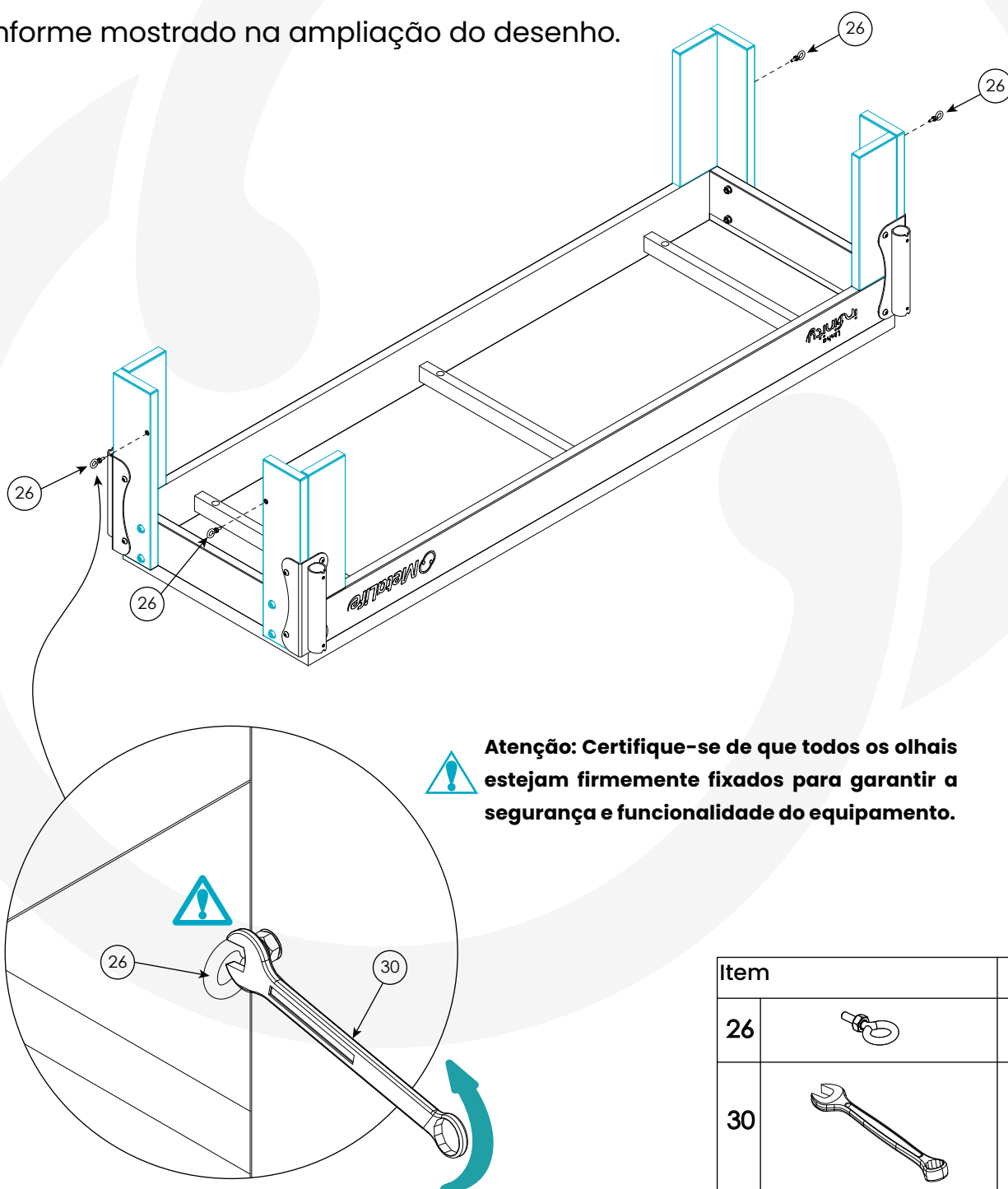


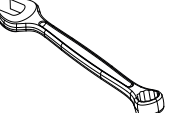Item		Qtd.
26		04
30		01

PASSO 07


Insira as colunas (itens 13 e 15) nos suportes localizados nas extremidades da estrutura. **Orientação importante:** As furações para a regulação do mancal deslizante devem estar voltadas para fora do aparelho. Caso os furos não estejam alinhados, inverta a posição da coluna, inserindo a outra extremidade


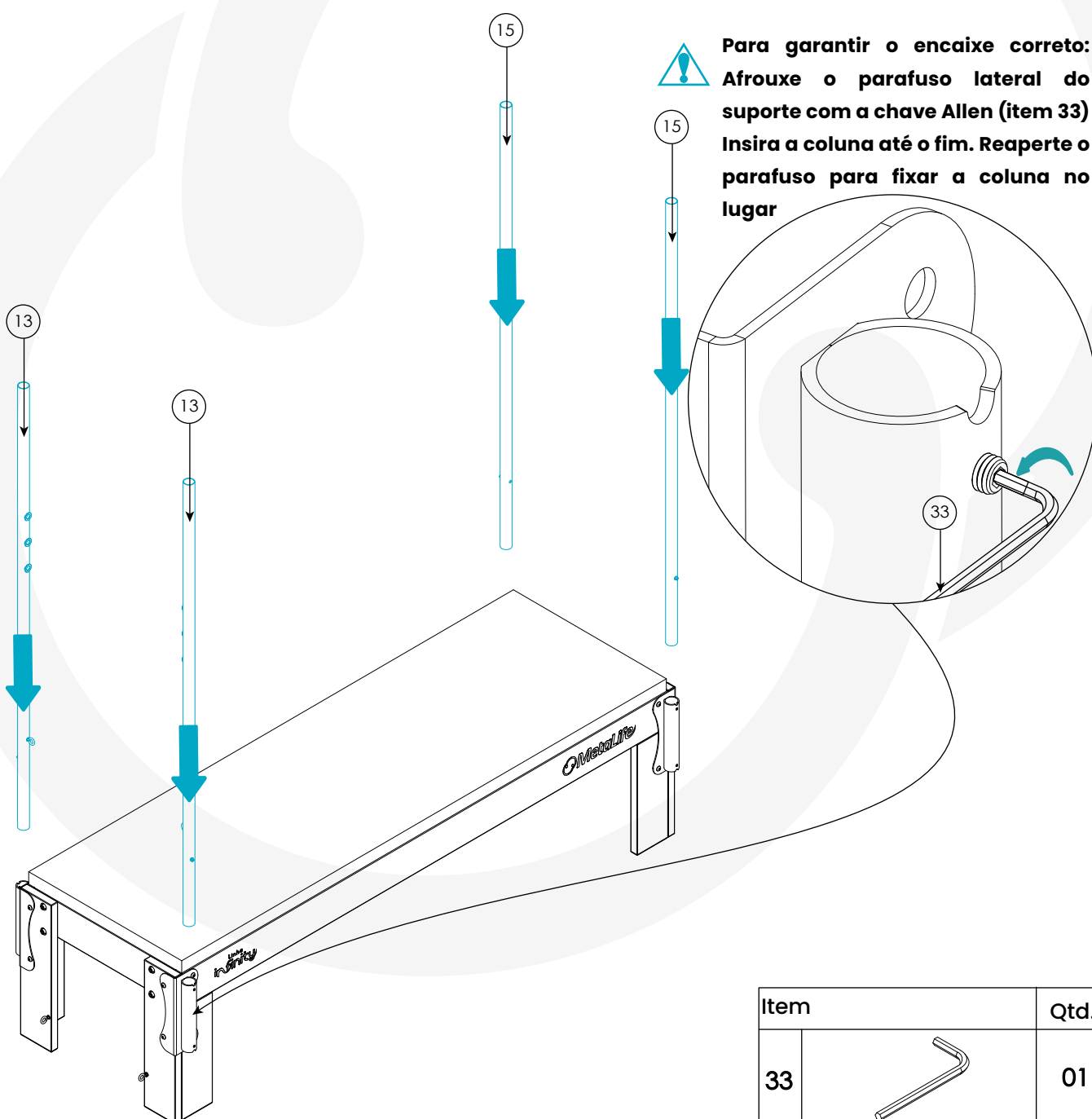


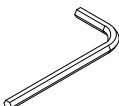Item		Qtd.
33		01

PASSO 08


Encaixe os manipululos automaticos (item 12) nas extremidades da travessa da barra deslizante vertical (item 08). Observe a posição da bucha interna, que deve estar alinhada com o tubo da travessa. Uma leve pressão com a mão (ou uma batida suave com palma aberta) é suficiente para garantir o encaixe completo das peças.

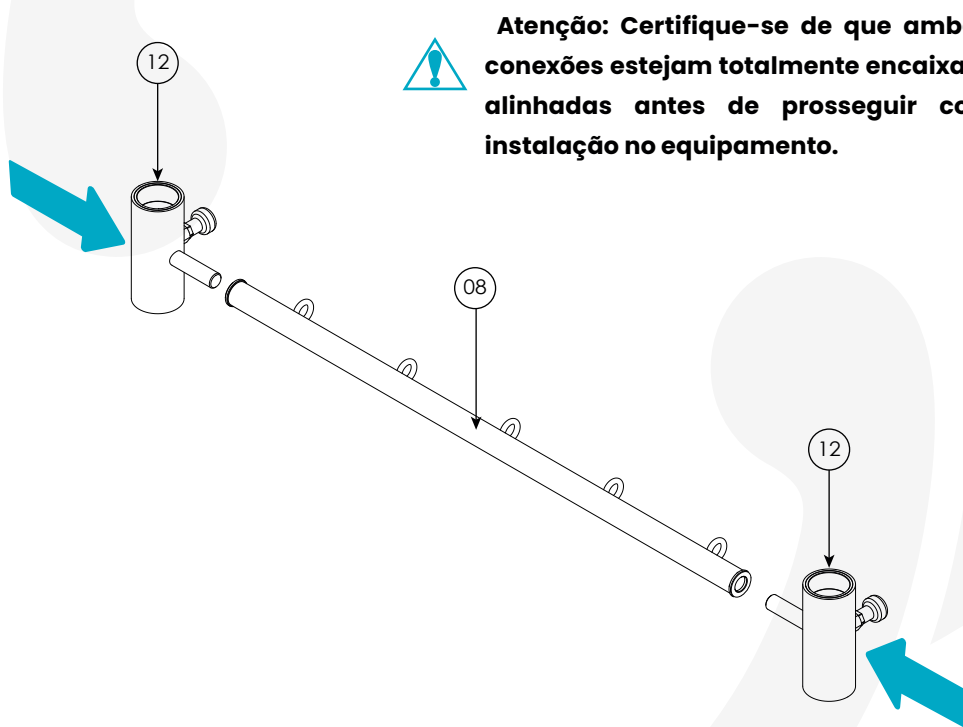

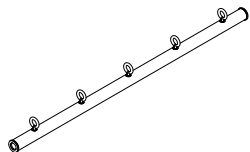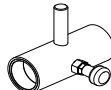Item		Qtd.
08		01
12		02

PASSO 09

Insira o mancal deslizante nas colunas do conjunto deslizante vertical, com os manípulos sempre voltados para fora da estrutura. Certifique-se de que as colunas utilizadas sejam, de fato, as do mancal deslizante.

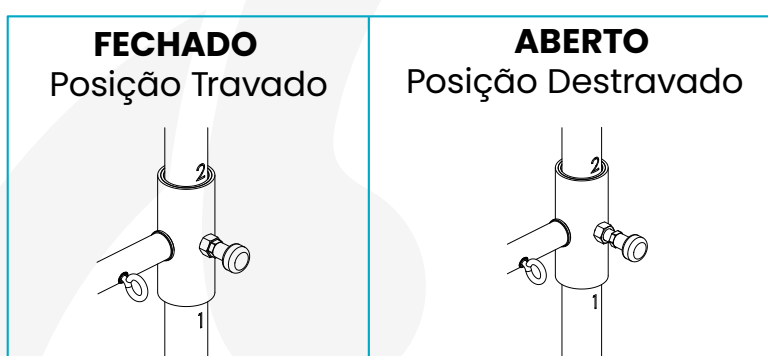

Posição Fechado (Travado):

O manípulo trava o conjunto na altura desejada.



Posição Aberto (Destravado):

Para destravar, puxe o manípulo e gire-o 90°. Isso libera o conjunto para ajuste de altura.

Após ajustar, retorne o manípulo à posição original, solte e verifique se houve o travamento correto.




Atenção: Certifique-se de que ambos os lados estejam na mesma altura antes de travar os manípulos.

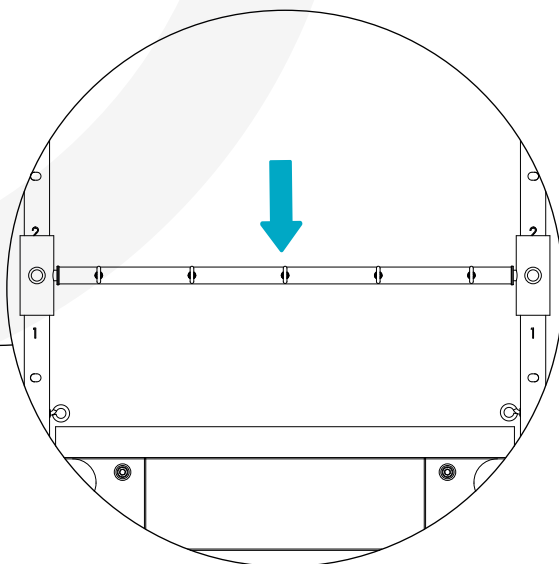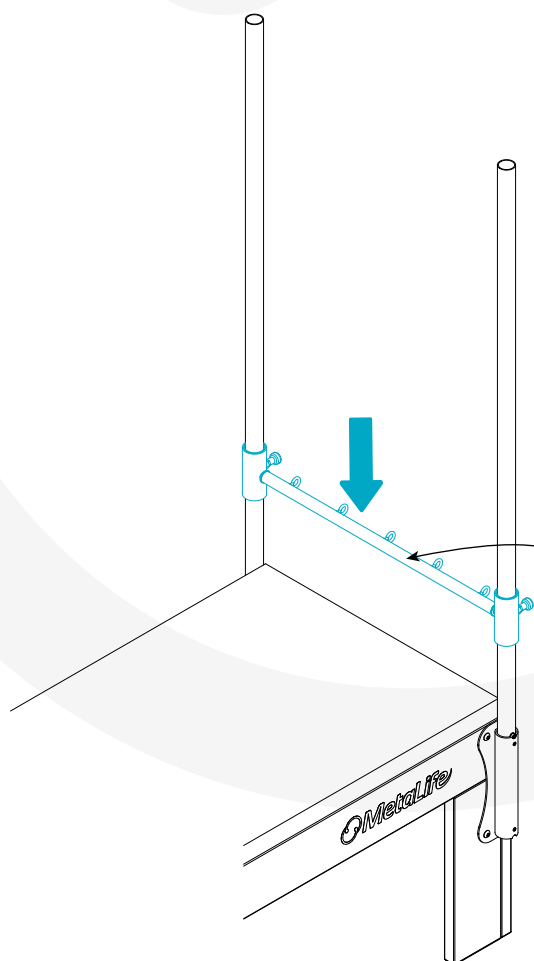

PASSO 10


Etapa 1 — Remoção dos Tubos de Transporte




Solte todos os parafusos das travessas superiores provisórias (tubos de transporte item 09) utilizando a chave Allen bicromatizada (item 32), conforme mostra a imagem. **Atenção:** Não descarte os parafusos, pois serão reutilizados no Passo 12. Após a remoção, os tubos de transporte podem ser descartados.

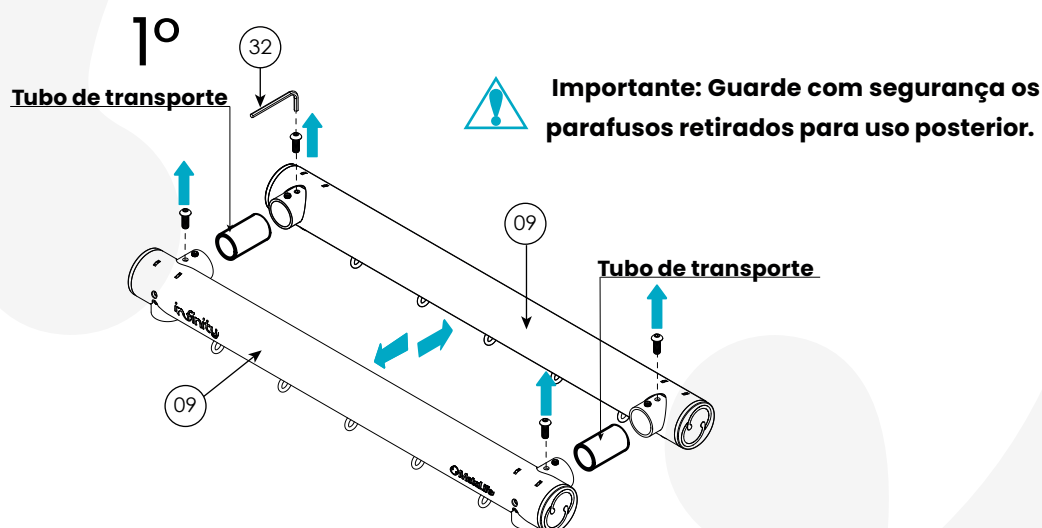

Etapa 2 — Instalação da Travessa Superior Definitiva


Encaixe mancal manual 3P (item 11) nas extremidades da travessa superior definitiva (item 07). Observe a posição da bucha interna, que deve se alinhar corretamente ao tubo. Uma leve batida com a palma da mão é suficiente para garantir o encaixe completo da peça.

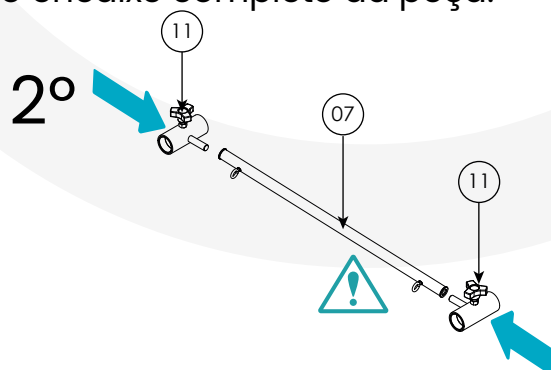

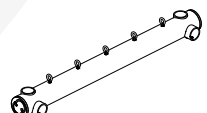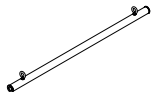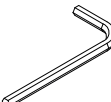Item		Qtd.
09		02
07		01
11		02
32		01

PASSO 11


Posicione as longarinas de maneira que se encaixem no suporte deslizante horizontal. Deixe o suporte deslizante com os olhais voltados para baixo. Encaixe os conjuntos travessa trilho superior nas extremidades das longarinas e assegure de que, os olhais estejam voltados para baixo.

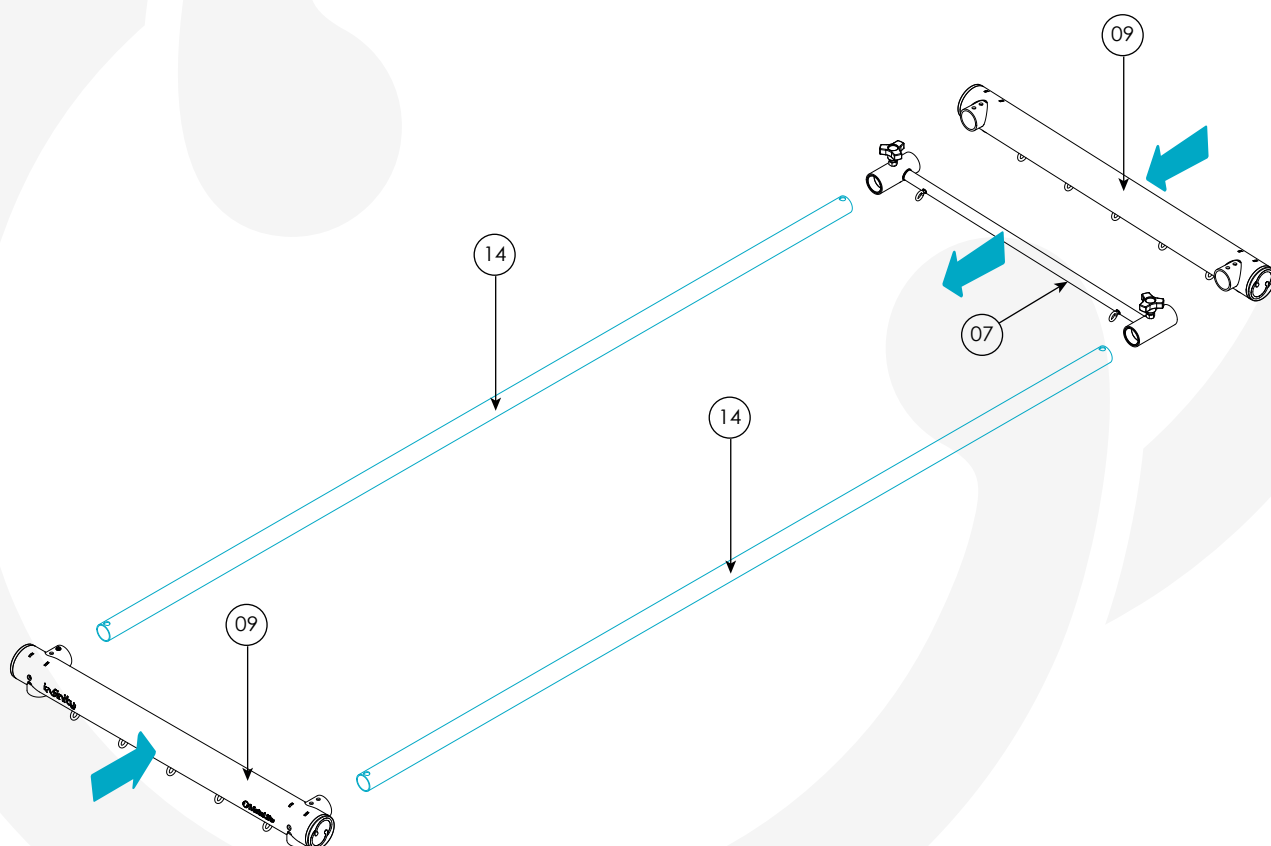

PASSO 12

Fixe os conjuntos de travessa superior nas extremidades das longarinas, utilizando os parafusos SI PN ZP 3/8x3 (item 22). Utilize a chave Allen 7/32 bicromatizada (item 32) para realizar o aperto dos parafusos. Realize este procedimento nos quatro cantos da estrutura, garantindo firmeza e alinhamento.

Em seguida, encaixe as travessas com trilho superior nas extremidades das longarinas, observando que os olhais devem estar voltados para baixo, conforme ilustrado nos passos anteriores.

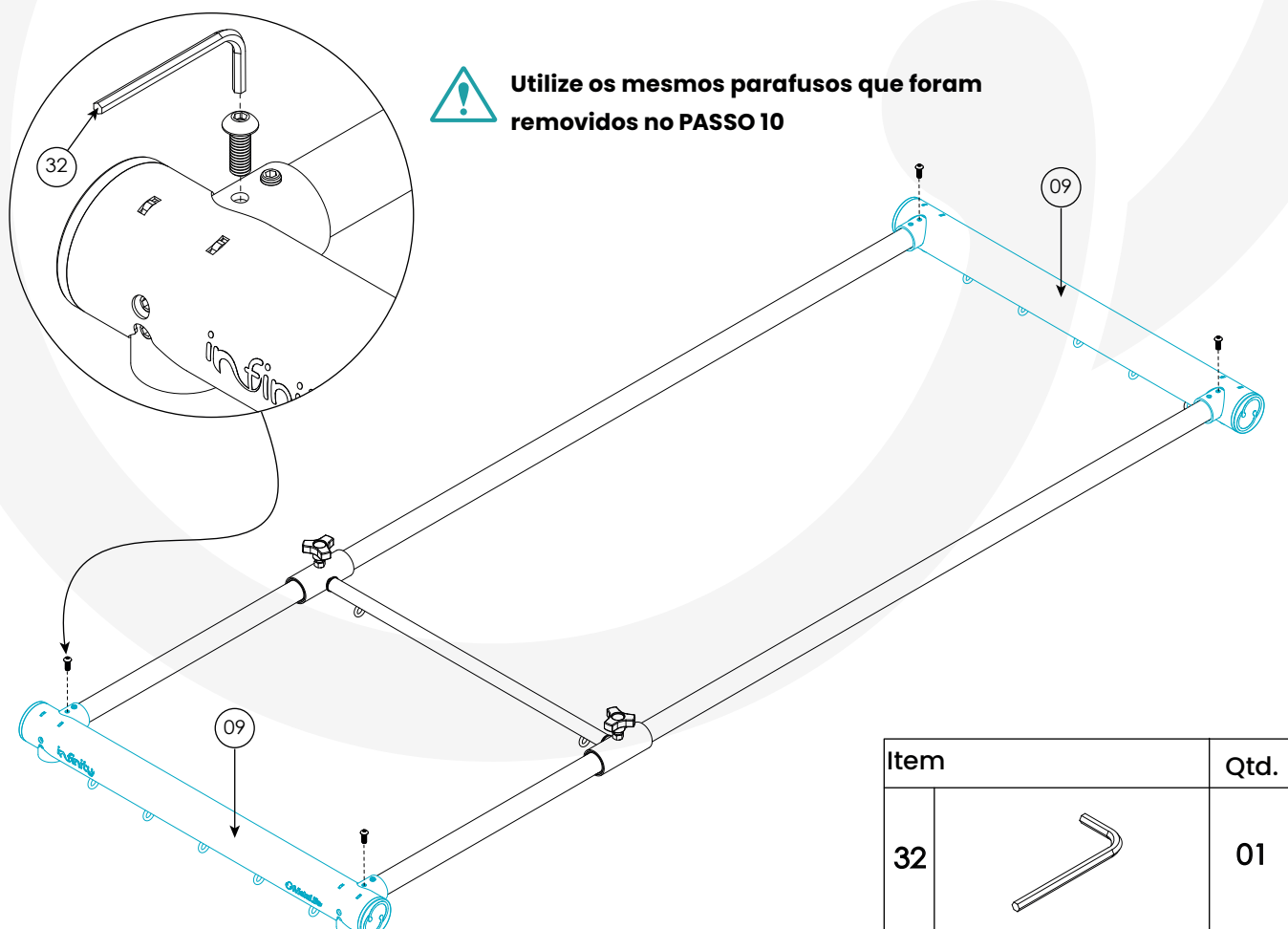


PASSO 13

Encaixe cuidadosamente a estrutura superior sobre as colunas do mancal deslizante, inserindo as conexões nas extremidades das colunas conforme ilustrado. Verifique o alinhamento das furações da estrutura superior com as das colunas antes de prosseguir com a fixação.



O correto encaixe e alinhamento são essenciais para garantir estabilidade e precisão no funcionamento do conjunto deslizante.

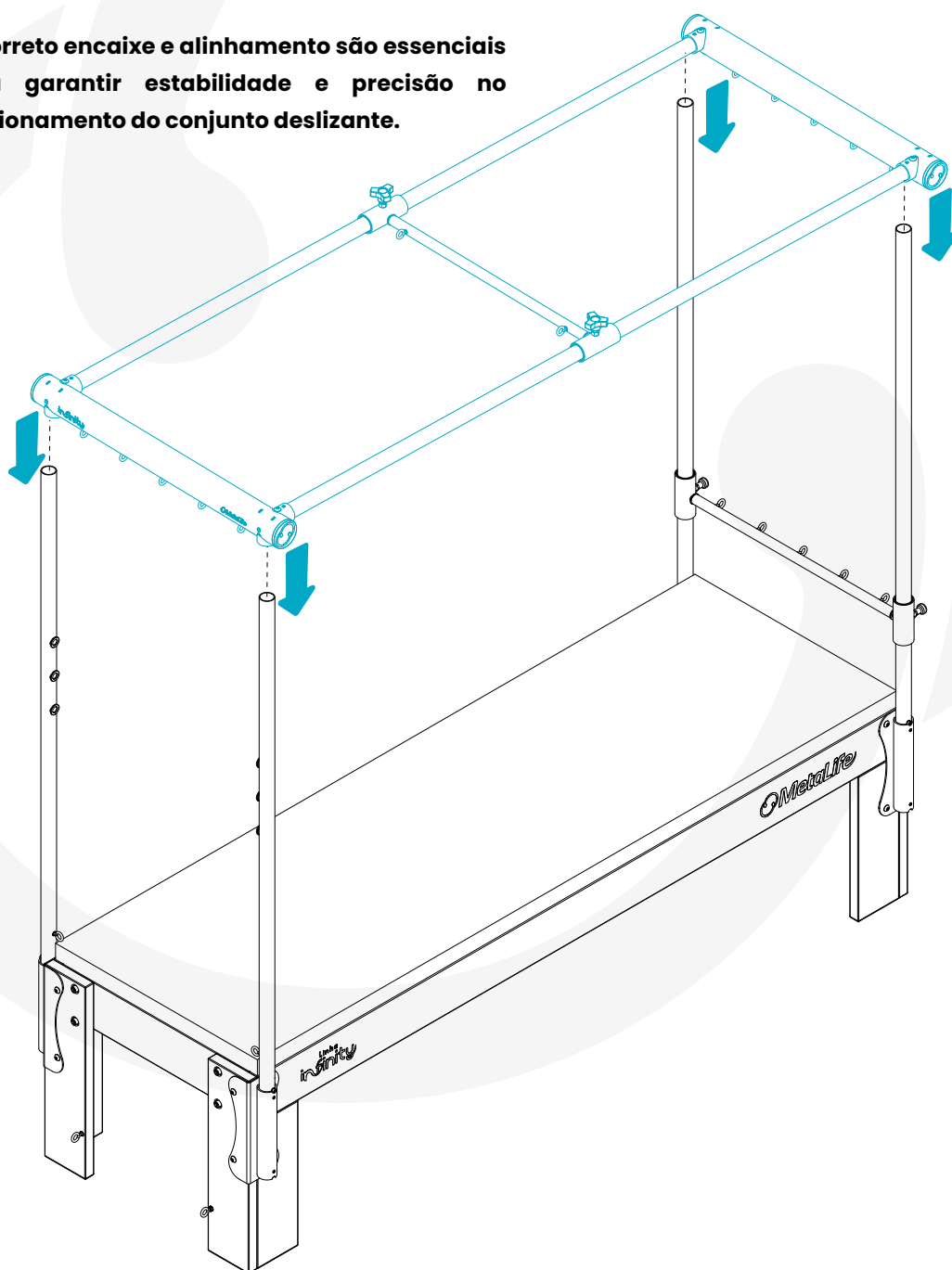



PASSO 14

Com a estrutura superior devidamente encaixada e alinhada nas colunas, utilize a chave Allen 3/16 prata para realizar o aperto final dos parafusos de fixação. Aperte os parafusos até que as cabeças fiquem completamente rentes às paredes dos suportes, garantindo firmeza e acabamento limpo. **Repita este procedimento em todos os quatro cantos da estrutura.**



Atenção: Verifique se não há folgas entre os encaixes após o aperto. Um travamento uniforme evita desalinhamento e garante estabilidade ao equipamento.

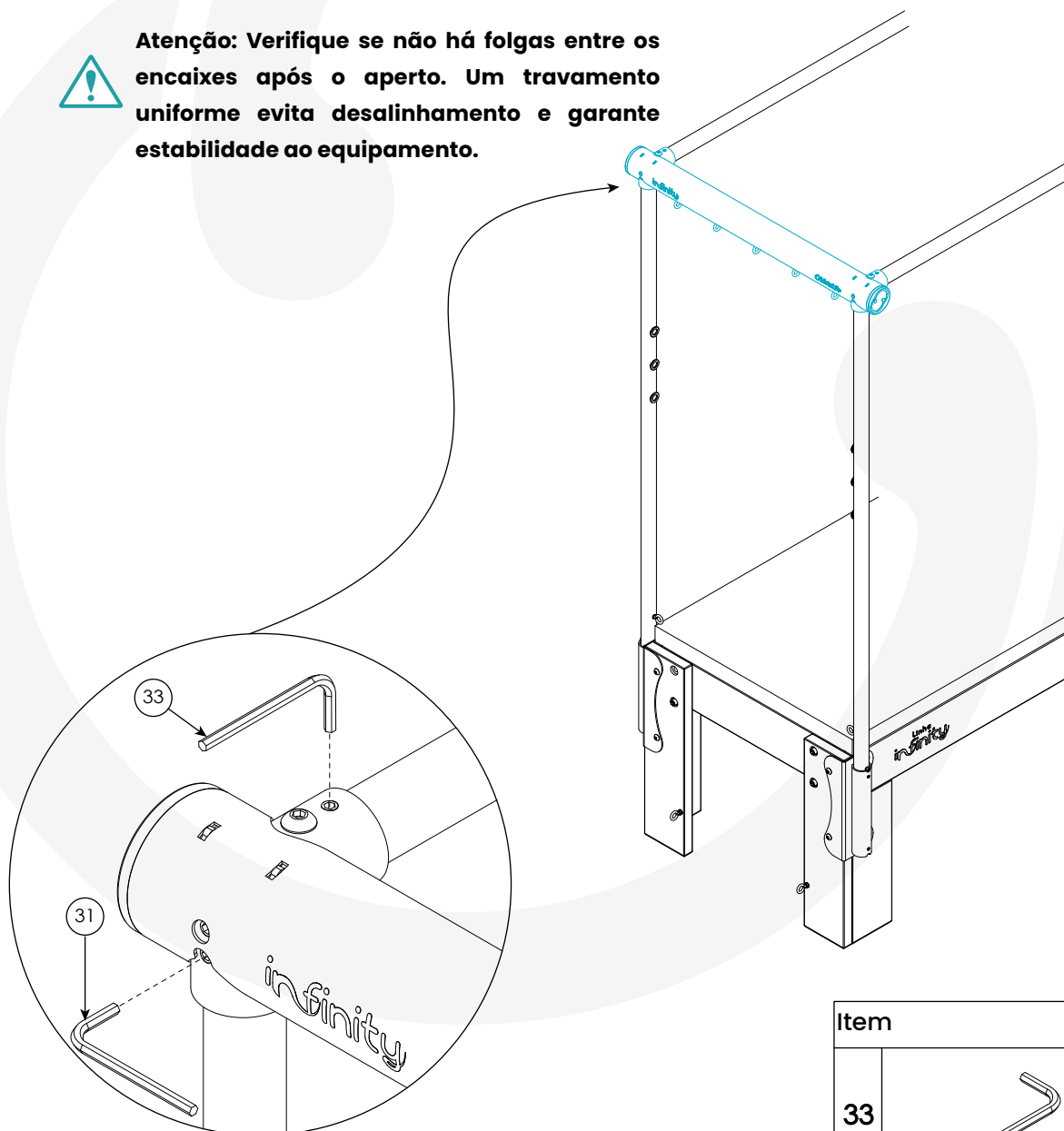

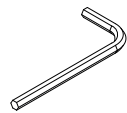Item		Qtd.
33		01


PASSO 15

Escolha a altura desejada para posicionar o quadro móvel entre as colunas. Posicione o quadro contra uma das colunas, pressionando-o suavemente para que o pino móvel se retraia. Continue empurrando o quadro até que o pino fixo do lado oposto se alinhe com uma das furações da outra coluna. Uma vez alinhado, solte o quadro. Ele se fixará automaticamente, encaixando-se nas colunas por meio dos pinos.

Esse sistema de pinos permite ajustes rápidos e seguros de altura, com encaixe preciso.




Atenção: Certifique-se de que ambos os pinos estejam corretamente inseridos nas furações antes de utilizar o equipamento.


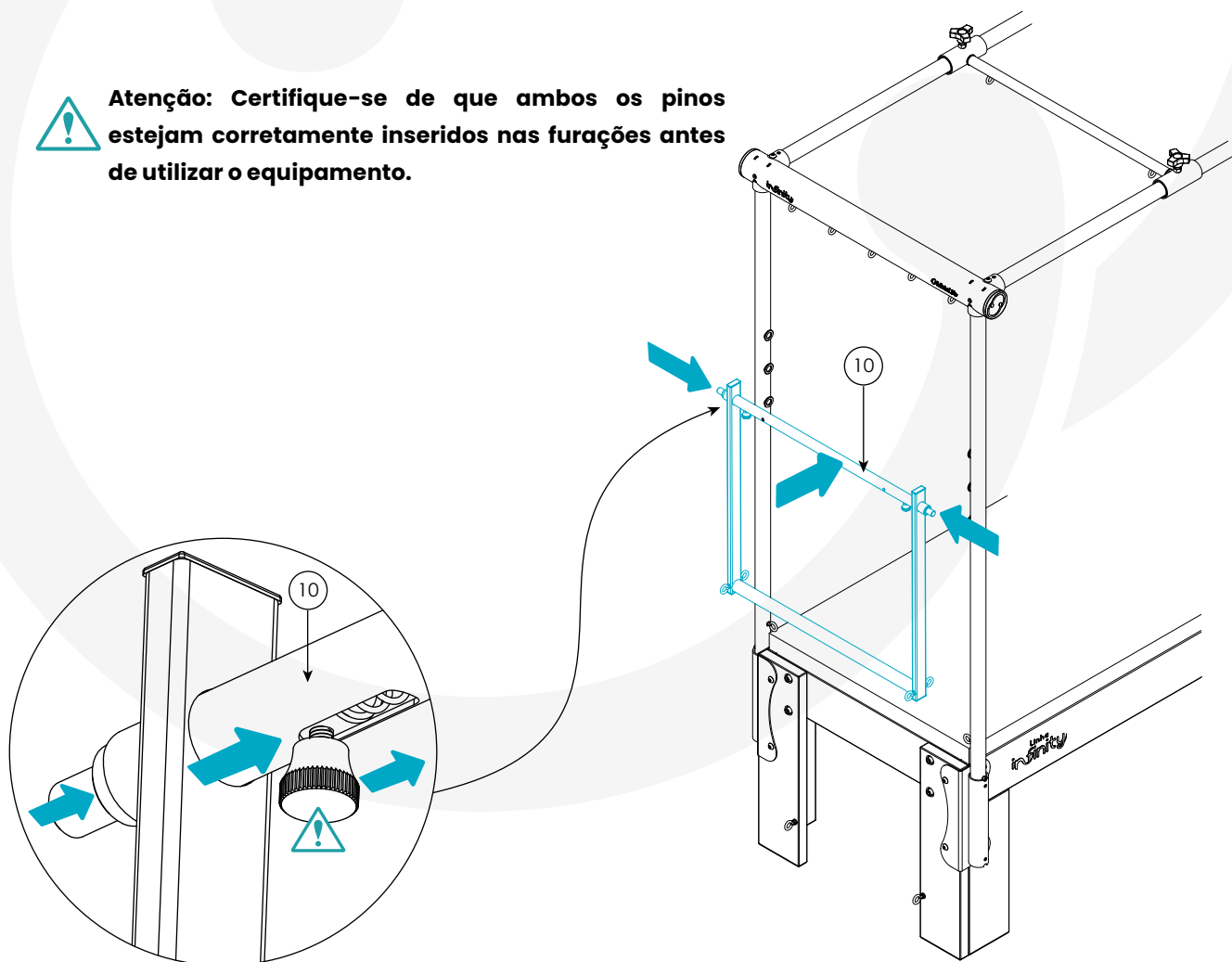



PASSO 16

Clip o mosquetão (item 27) na mola de lacre vermelho (item 16). Em seguida, prenda o conjunto no suporte deslizante central, conforme indicado na ilustração. Repita esse procedimento duas vezes, utilizando duas molas com seus respectivos mosquetões. Após a fixação das molas, adicione a capa protetora de molas (item 40), envolvendo o conjunto conforme indicado.

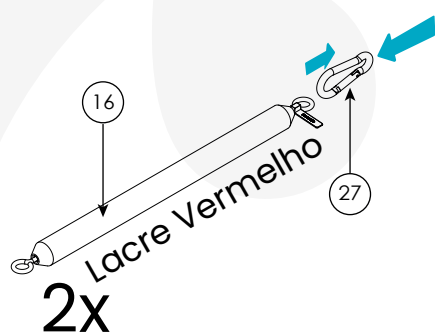

Atenção: Verifique se os mosquetões estão devidamente travados nas argolas do suporte central para garantir segurança durante o uso

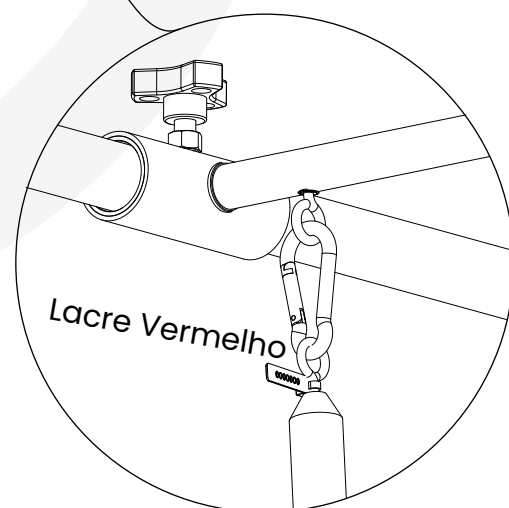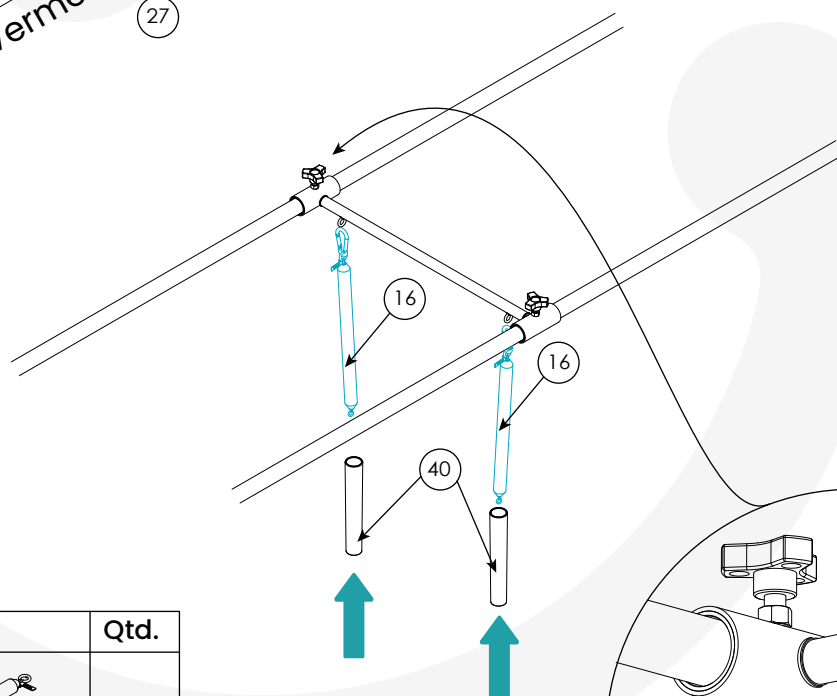

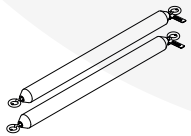Item		Qtd.
16		02
27		02
40		02


PASSO 17

Prenda os mosquetões (item 27) nas extremidades das molas com lacre vermelho (item 16). Em seguida, encaixe o trapézio (item 06) nos mosquetões. Certifique-se de que o estofado esteja voltado para cima durante essa etapa de montagem. Após a fixação do trapézio, clique a alça de abdômen (item 38) na face inferior do trapézio, conforme indicado na imagem de referência.


Ajuste da Travessa Deslizante do Trapézio




Para regular a posição da travessa deslizante: Afrouxe os manípulos localizados nas laterais da travessa Desloque o conjunto até a distância desejada Reaperte os manípulos para travar a posição com segurança

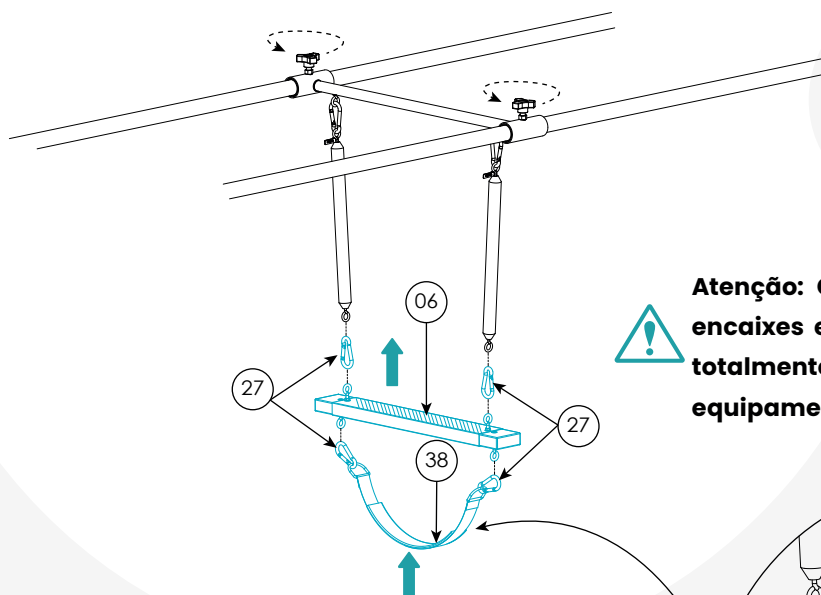



Atenção: Certifique-se de que todos os encaixes estejam firmes e os manípulos totalmente travados antes do uso do equipamento

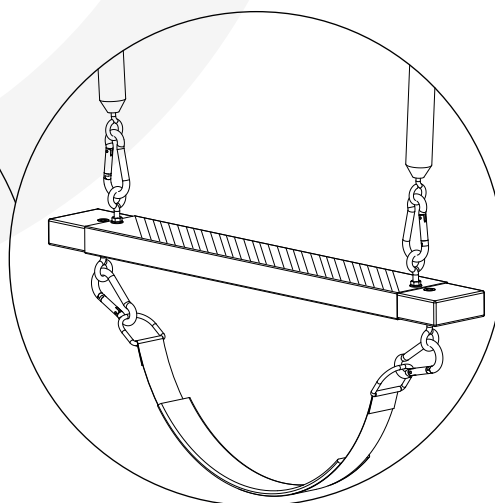


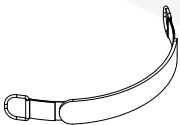
Item		Qtd.
38		01
27		02





PASSO 18

Clipe os mosquetões (item 27) nas extremidades das seguintes molas: Molas de lacre azul (item 17) Molas de lacre amarelo (item 20). Após a fixação, adicione a capa protetora de molas (item 40) somente nas molas de lacre azul, envolvendo completamente as duas unidades.

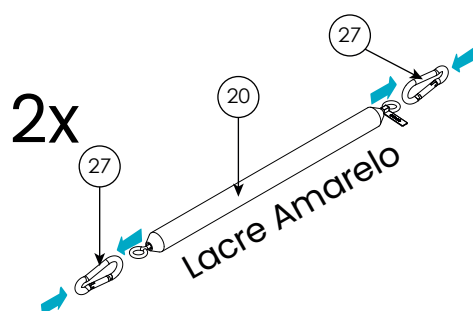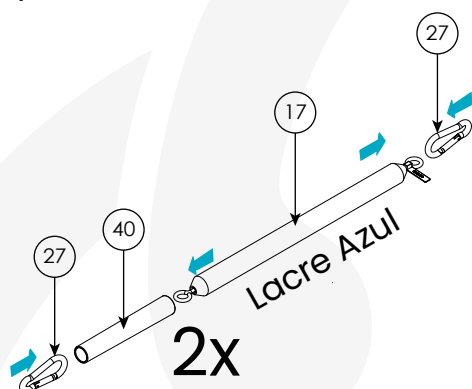




Atenção: Verifique se todos os mosquetões estão bem travados e se a capa está ajustada corretamente nas molas azuis para garantir segurança e evitar desgastes.

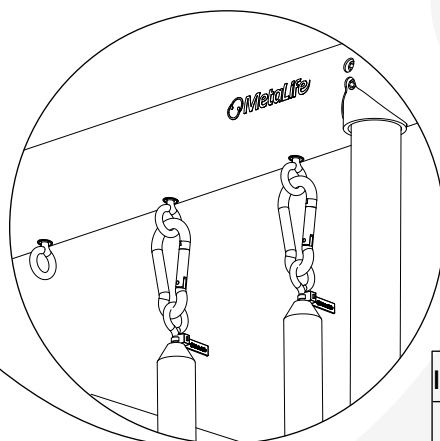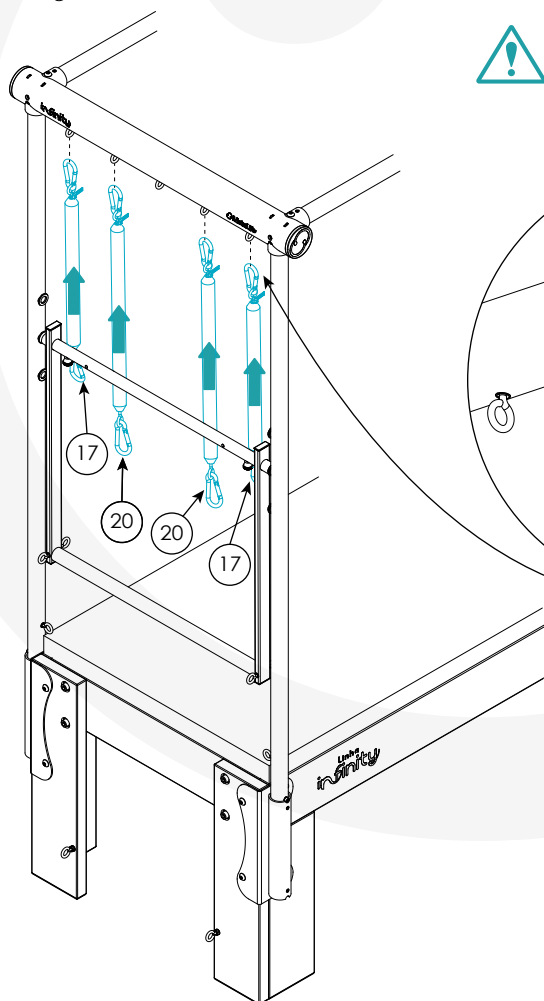

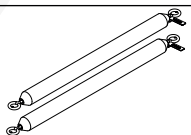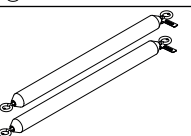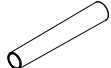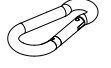Item		Qtd.
17		02
20		02
40		02
27		08


PASSO 19

Passe a alça de segurança por dentro do laço maior localizado em sua própria extremidade, de forma que ela envolva firmemente a travessa superior do Cadillac. Puxe a alça para dar o aperto, fixando-a corretamente na estrutura. Na ponta livre da alça, conecte um mosquetão (item 27). Em seguida, passe o mosquetão pela barra de apoio e prenda-o em um dos três elos de regulação presentes na própria alça, de acordo com a posição desejada para o quadro barra de apoio.

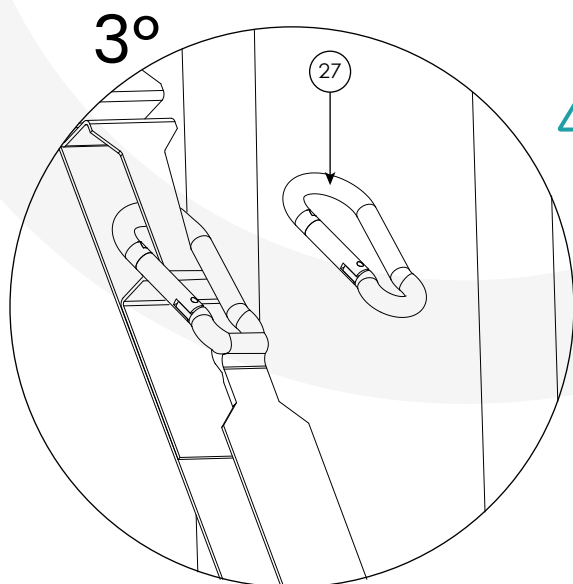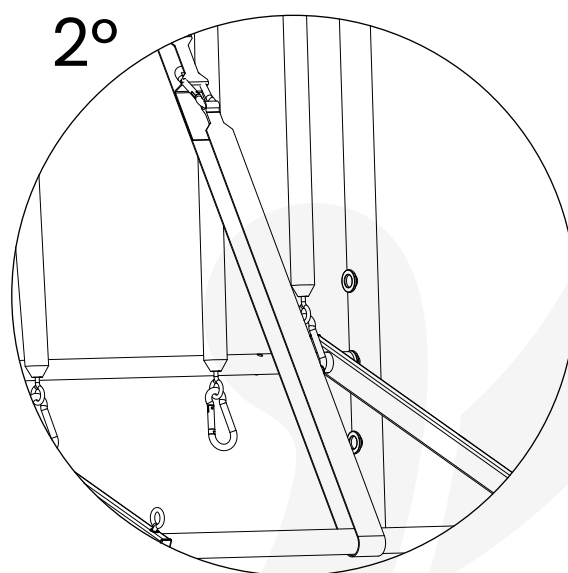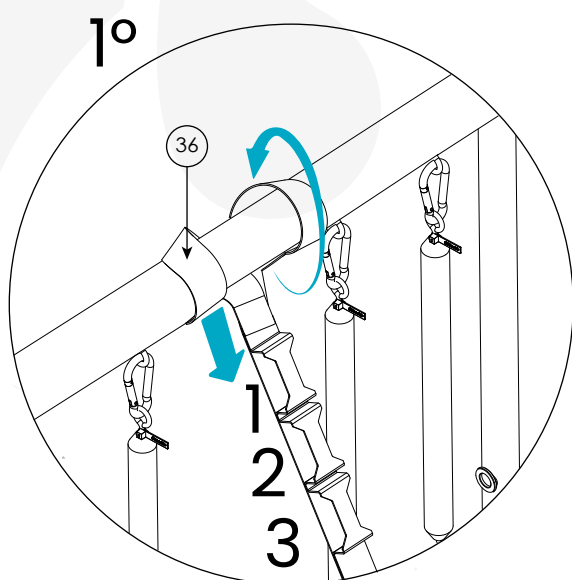


Atenção:

Certifique-se de que a alça esteja corretamente ajustada e o mosquetão devidamente travado no elo correspondente para garantir a segurança durante o uso do equipamento.

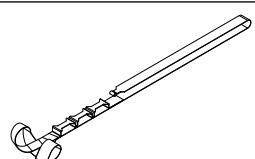Item		Qtd.
36		01
27		01


PASSO 20

Com a alça de segurança já instalada, realize a inspeção completa do equipamento, certificando-se de que: Todas as conexões estão firmes e bem apertadas. Os mosquetões estão travados corretamente nas molas e elos de regulagem. As travessas e colunas estão alinhadas e devidamente fixadas. As capas protetoras de mola estão corretamente posicionadas.

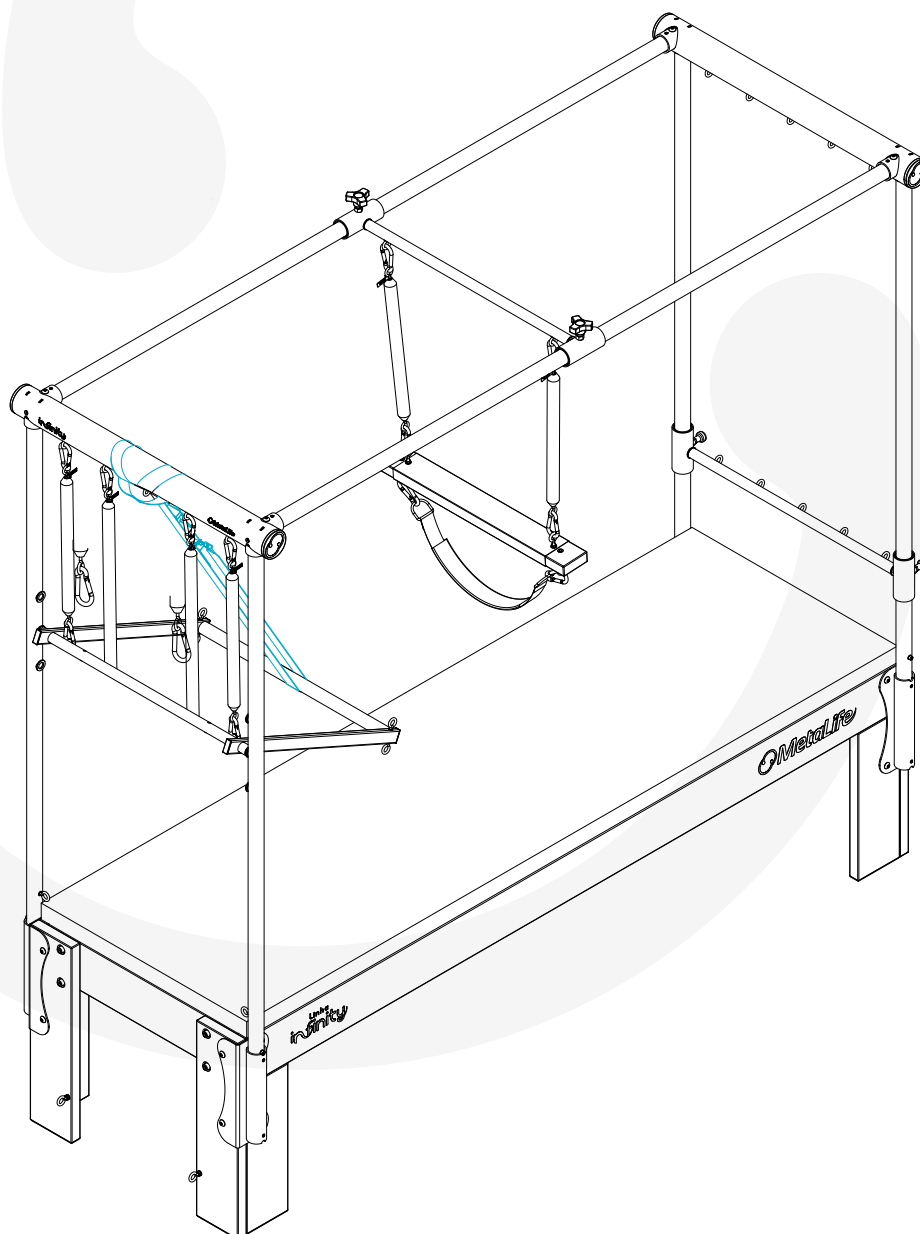



PASSO 21

Para utilizar o equipamento corretamente: Prenda cada alça à sua respectiva mola, conectando a meia-argola da alça ao mosquetão já instalado na mola. Certifique-se de que o mosquetão esteja totalmente fechado e travado, garantindo a segurança do usuário durante os exercícios.

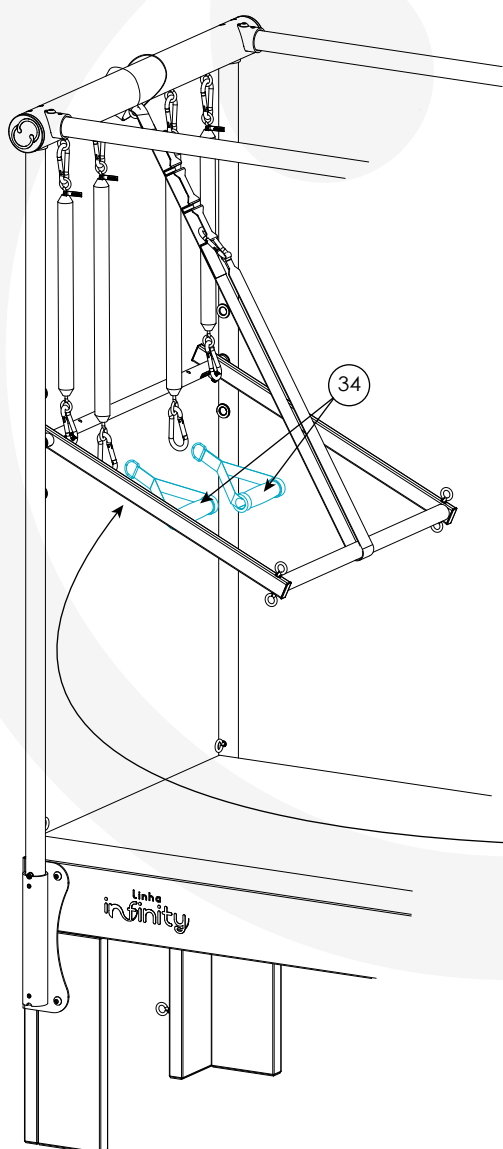

Atenção: Sempre verifique se os pontos de fixação estão firmes antes de iniciar qualquer exercício. O uso inadequado pode comprometer a integridade do equipamento e a segurança do praticante.

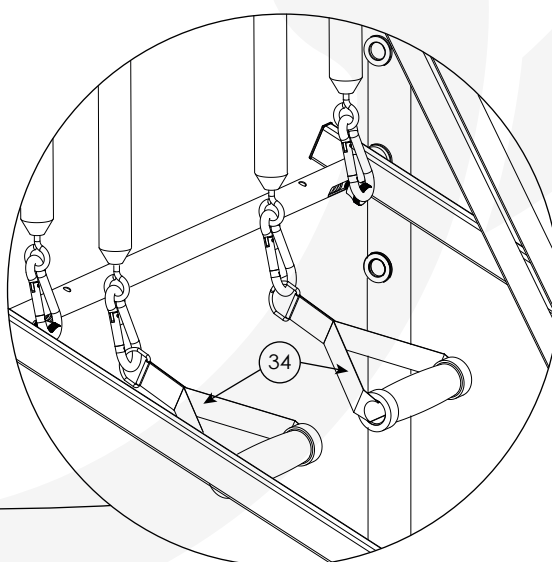

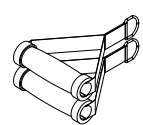Item		Qtd.
34		02




PASSO 22



Adicione os mosquetões (item 27) nas extremidades das seguintes molas:

Molas com lacre preto (item 18) Molas com lacre branco (item 19). Realize esse procedimento para duas unidades de cada tipo de mola. Em seguida, clique os mosquetões diretamente na travessa superior, conforme ilustrado no diagrama correspondente.



Atenção: Sempre verifique se os pontos de fixação estão firmes antes de iniciar qualquer exercício. O uso inadequado pode comprometer a integridade do equipamento e a segurança do praticante.

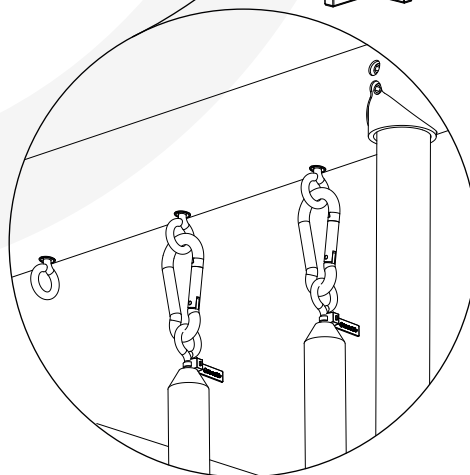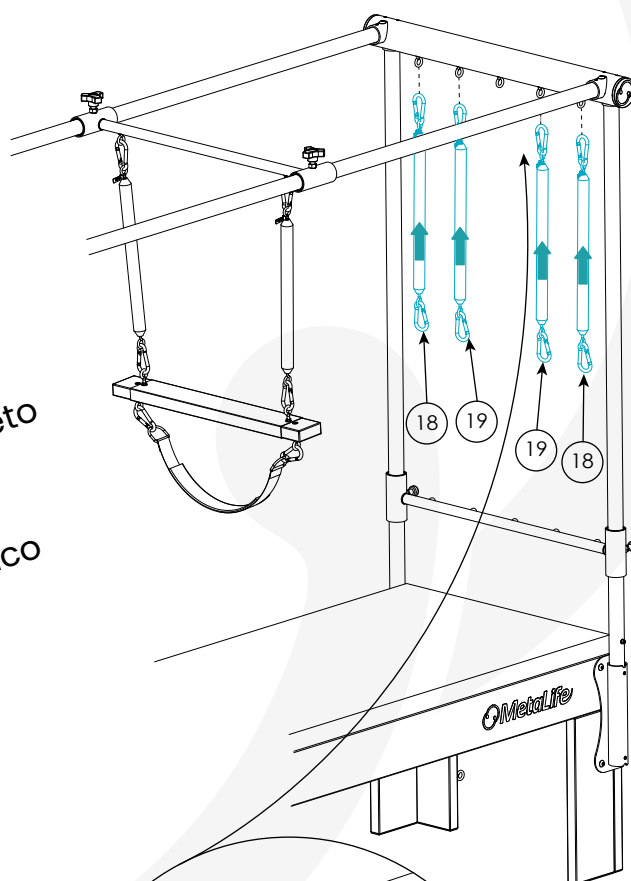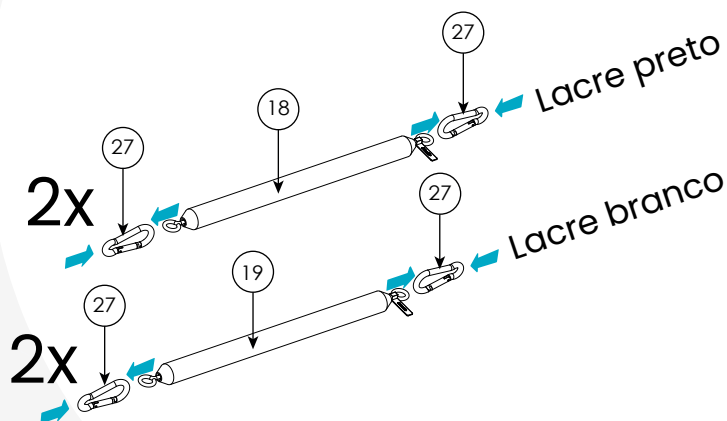

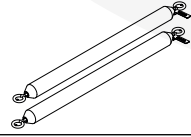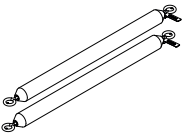Item		Qtd.
27		08
18		02
19		02


PASSO 23


Para utilizar a barra roll-down siga as orientações abaixo:

Prenda nas duas molas de mesma cor, garantindo que tenham a mesma tensão (duas molas de cor preta). Em seguida, engate o mosquetão da extremidade de cada mola diretamente nos olhais localizados nas extremidades da barra roll-down.



Atenção: O uso de molas com tensões diferentes ou em alturas desiguais pode gerar instabilidade e comprometer a execução dos exercícios.

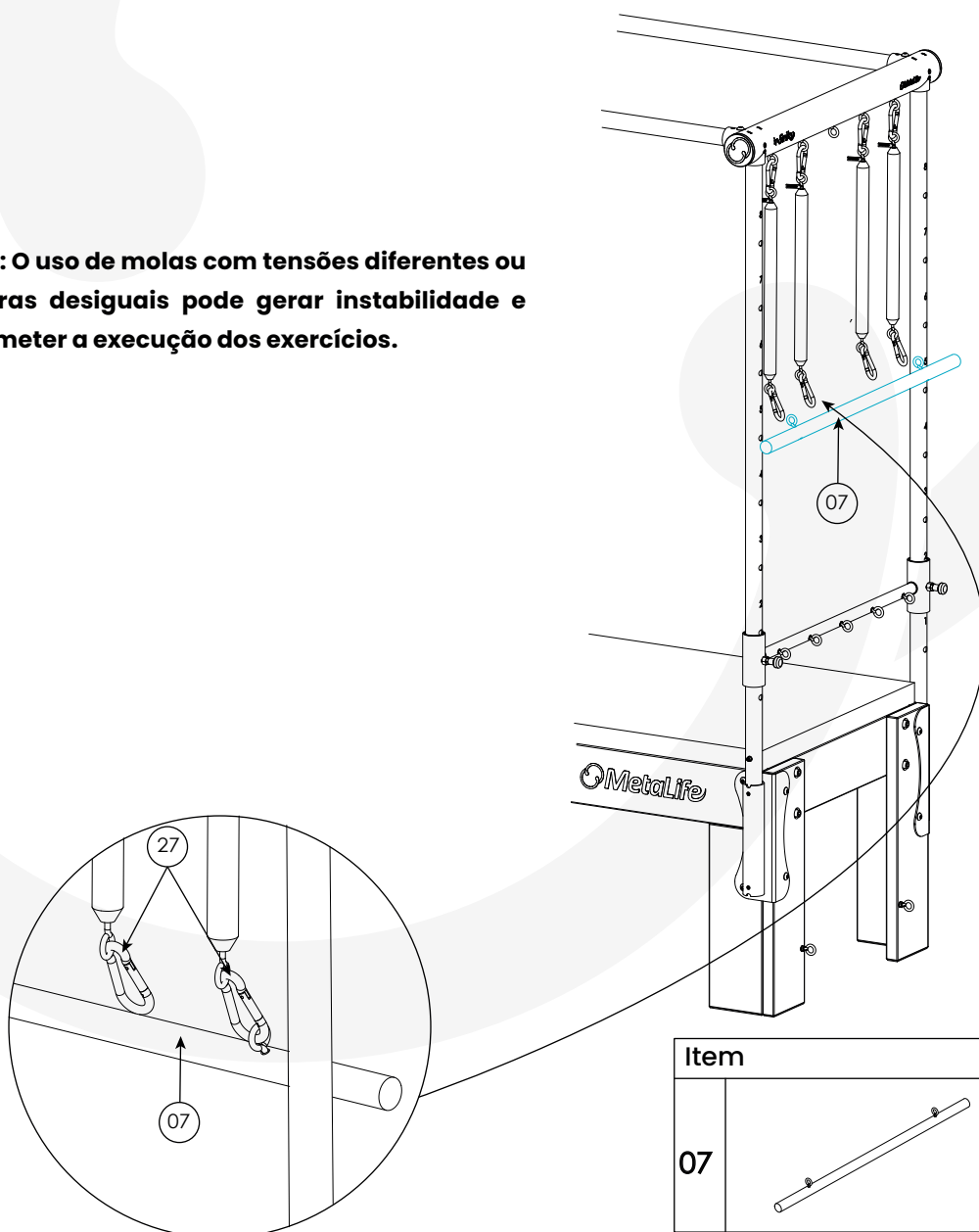


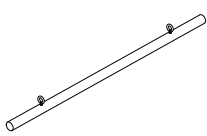Item		Qtd.
07		01


PASSO 24


Para utilizar o equipamento com alças:

Prenda cada alça à sua respectiva mola, conectando a meia-argola da alça ao mosquetão já fixado na extremidade da mola. Certifique-se de que o mosquetão esteja totalmente fechado e travado, garantindo segurança durante a execução dos exercícios.

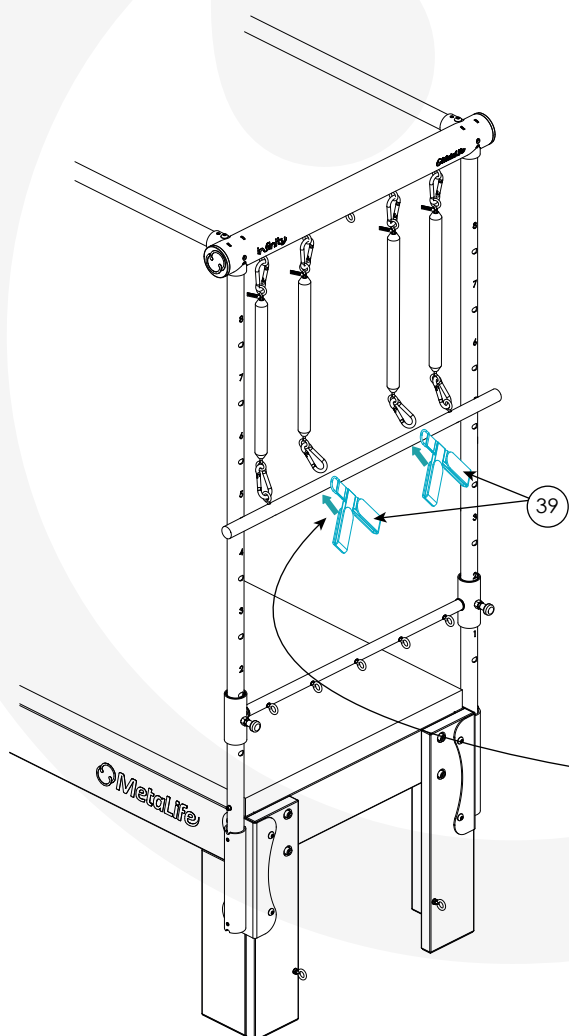


Atenção: Antes de iniciar qualquer atividade, verifique o travamento das conexões e o estado geral das alças e molas.

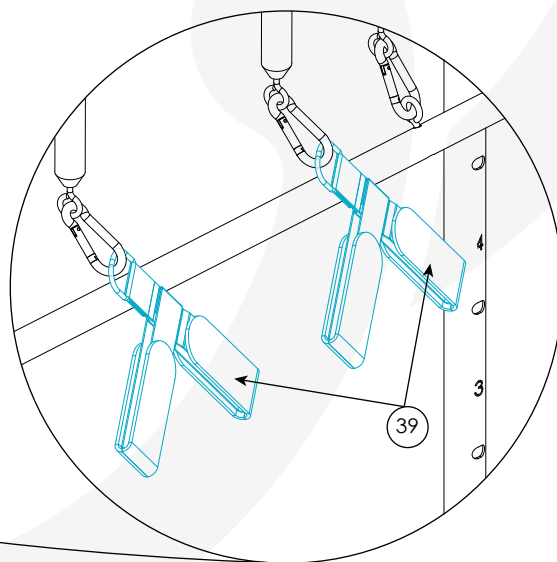

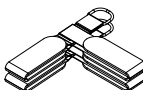
Item		Qtd.
39		02

PASSO 25

Fixe as alças fuzzy diretamente nas longarinas superiores do Cadillac, Posicione cada alça fuzzy conforme a orientação desejada para o exercício (vertical ou horizontal), garantindo que ambas estejam firmemente presas e alinhadas.

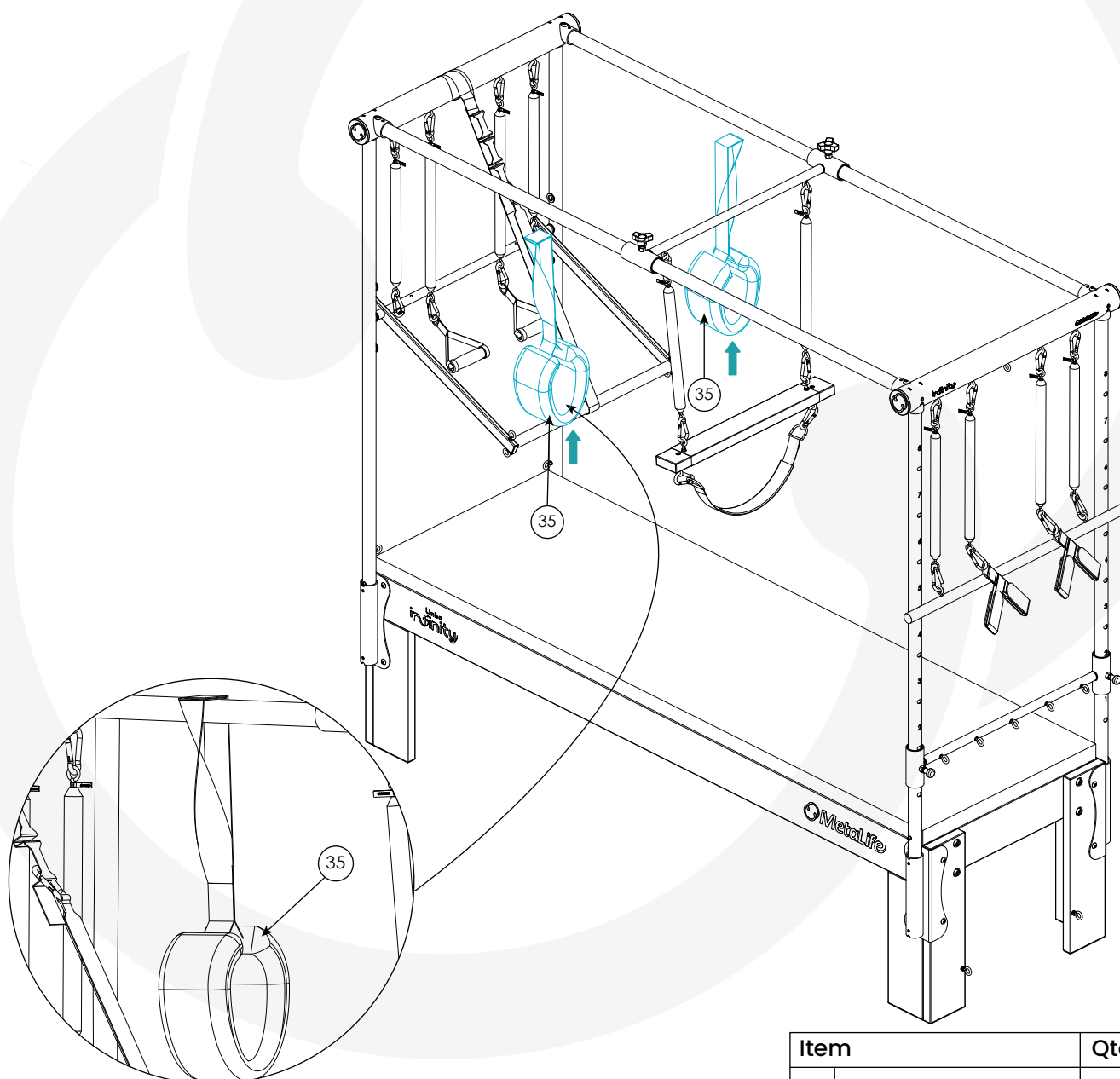



Atenção: Verifique se as alças fuzzy estão bem fixadas e se não há torções nos mosquetões. A instalação correta é essencial para conforto e segurança durante os exercícios suspensos.

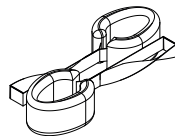Item		Qtd.
35		02

PASSO 26

Para concluir a montagem: Prenda a alça de sustentação (item 37) utilizando um mosquetão (item 27). Posicione o mosquetão de forma que a alça fique voltada para a face inferior da estrutura, conforme indicado no desenho.

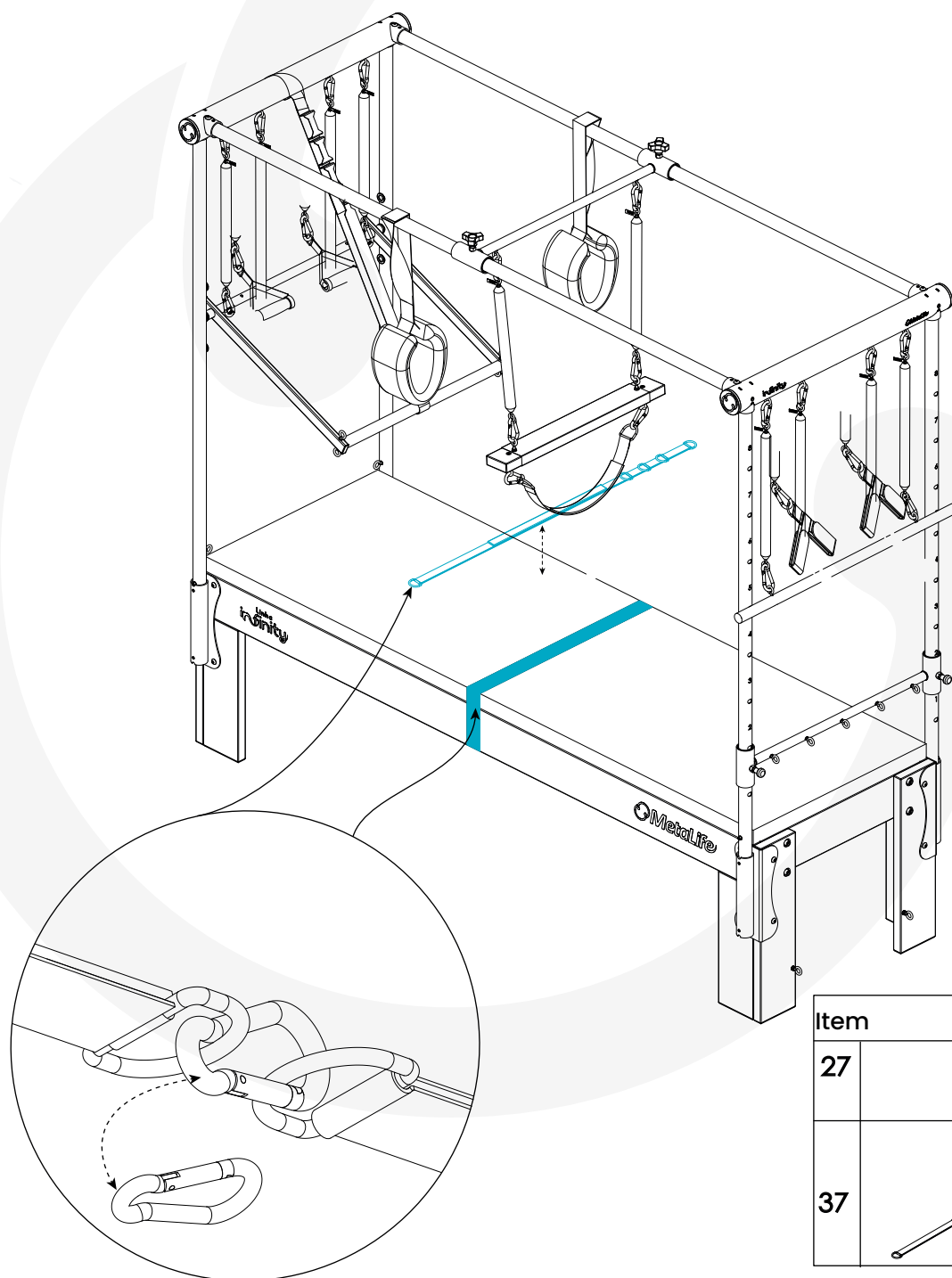

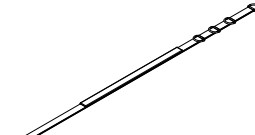Item		Qtd.
27		01
37		01

Manutenção e Segurança

Este manual apresenta dicas para prolongar a vida útil do seu equipamento. Consulte as características específicas do seu produto e siga atentamente as instruções. Se tiver dúvidas, entre em contato com nossa assistência técnica da MetaLife pelos contatos abaixo.



0800 056 2467



assistencia@metallife.com.br

ESTRUTURA

A estrutura do Cadillac, embora resistente, pode sofrer alterações ao longo do tempo devido a fatores ambientais, como temperatura do ar, presença de vapores químicos e umidade, que podem causar desgaste no acabamento, manchas ou corrosão. Para preservar sua integridade e garantir a segurança, é essencial mantê-lo em locais secos, ventilados e longe de agentes corrosivos. Caso entre em contato com líquidos, é importante secá-lo imediatamente com um pano macio e evitar o uso de produtos abrasivos durante a limpeza.

ESTOFADOS

Os estofados são revestidos com couríssimo, que pode se desgastar com o uso e o tempo. Para prolongar a vida útil do seu estofado, siga as orientações de manutenção. A exposição à luz direta é prejudicial, pois resseca e enfraquece a trama, podendo causar rachaduras na superfície. Portanto, proteja seu estofado dos raios solares.

A limpeza frequente também é essencial. Remova o pó com um pano macio e seco. Para uma higienização mais profunda, utilize um pano levemente umedecido com solução de sabão ou detergente neutro. Evite o uso de removedores, solventes como benzina, alvejantes, álcool, abrasivos, amoníacos, lustra móveis, polidores e óleos, pois esses produtos podem danificar a proteção do couríssimo, causando rachaduras e manchas.

ALÇAS

A manutenção das alças é essencial para prolongar sua vida útil e manter a higiene. Não lave na máquina, pois as meia-argolas de metal podem danificar seu eletrodoméstico. Para higienizar as alças, umedeça um pano limpo e macio com solução de sabão ou detergente neutro e passe por toda a alça. Em seguida, enxágue com um pano úmido e seque bem. Evite o uso de álcool ou alvejante, pois esses produtos podem danificar e manchar as alças. Também evite a exposição excessiva à luz solar, pois ela resseca a trama. Para alças com velcro, mantenha-as fechadas quando não estiverem em uso, para evitar que fiapos se acumulem nos ganchos.

METAIS E SEUS ACABAMENTOS

A poeira, umidade e maresia aceleram a oxidação dos metais. Nossos produtos são destinados ao uso interno e não devem ser expostos às intempéries. Para a limpeza das superfícies metálicas, como aço inox, zincado, niquelado, cromado ou pintado, utilize uma flanela seca semanalmente para remover o pó. Para uma limpeza mais intensa, use um pano levemente umedecido com álcool, evitando aplicá-lo diretamente no equipamento. Evite impactos, pois podem danificar o acabamento e expor o metal à oxidação. Não utilize materiais que sejam abrasivos nem deixe líquidos secarem sobre a peça.

Para manchas em peças pintadas, cromadas ou niqueladas, recomendamos o uso de flanela ou malha de algodão com detergente neutro ou cera automotiva em casos mais difíceis.

Abaixo, veja a lista de materiais e acabamentos de cada parte do Cadillac:

- **Inox:** Olhais;
- **E-coat:** Molas;
- **Pintado:** Barra rolldown; Travessa Horizontal; Travessa Vertical; Travessa Superior; Quadro auto-retrátil; manipulador Manual; manipulador automático; Coluna Barra Giratória; Longarina; Coluna Barra Deslizante; Suporte Coluna.

SEGURANÇA

Assim como outros equipamentos mecânicos, os aparelhos de pilates estão sujeitos ao desgaste e estresse. A manutenção correta e substituição periódica dos componentes são de sua responsabilidade, contribuindo para a prevenção de acidentes.

Use apenas produtos fornecidos pela MetaLife para manutenção e substituição de componentes. A MetaLife não se responsabiliza por utilização inadequada do equipamento. Certifique-se de que o aparelho esteja instalado em ambiente adequado para a prática do pilates, conforme orientações anteriores.

Vista-se adequadamente. Não use roupas largas, brincos, relógios, anéis, pulseiras, correntes ou qualquer outro tipo de adereço. Mantenha seus cabelos e roupas afastados das peças móveis. Roupas folgadas, joias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.

Utilize o equipamento somente para os exercícios definidos pelo método Pilates. Consulte um médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios físicos. Interrompa qualquer exercício caso sinta dor no peito, falta de ar, dificuldade para respirar, sensação de desmaio ou qualquer tipo de desconforto muscular. Procure orientação profissional imediatamente.

A aplicação do método pilates, assim como a utilização de seus equipamentos, deve ser feita exclusivamente sob a orientação de profissionais devidamente treinados e qualificados no método.

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA ANTES DO USO

A inspeção de segurança deve ser realizada antes de cada uso. Verifique se os dispositivos e acessórios estão seguros, limpos e adequados para os exercícios:

- Verifique se todos os componentes estão fixados e ajustados corretamente.
- Certifique-se de que os manípulos e molas estejam em bom estado.
- Não use a Step Chair se houver componentes danificados ou desgastados.
- Ajuste o equipamento conforme as necessidades do usuário.
- Substitua peças apenas pelas fornecidas pela MetaLife.

Revisão Semanal:

Realize a revisão semanal com um profissional qualificado em pilates.

- Verifique se todos os componentes estão fixados e ajustados corretamente;
- Certifique-se de que os manípulos e molas estejam em bom estado;
- Garanta que os mosquetões estejam fechados e travados;

- Não use o equipamento se houver componentes danificados;
- Ajuste o equipamento conforme as necessidades do usuário;
- Substitua peças apenas pelas fornecidas pela MetaLife.

Revisão Trimestral:

A revisão trimestral deve ser realizada a cada três meses, ou após 1000 horas de uso, por um profissional qualificado.

- Inspecione o equipamento em busca de alterações, fraturas ou desgaste.
- Realize ajustes e use ferramentas fornecidas para garantir fixação adequada.
- Substitua componentes danificados e informe a Metalife, se necessário.
- Verifique o tensionamento das molas e substitua-as se houver variações ou após 2 anos/8000 horas de uso.
- Substitua os mosquetões a cada 24 meses.
- Verifique se as alças estão bem fixas ao velcro e substitua-as em caso de desgaste.

Termo de Garantia

A garantia do produto Metalife Pilates cobre defeitos de fabricação, desde que comprovados pela MetaLife ou rede de assistência técnica autorizada, dentro do prazo legal de 03 meses a partir da data de emissão da nota fiscal. A MetaLife concede 21 meses de garantia adicional, totalizando 24 meses. A classificação da garantia é a seguinte:

- **03 meses:** cordas, estofados, tecidos, borracha e acabamentos superficiais (pinturas, cromagem, niquelagem e zincagem);
- **06 meses:** ferragens, peças plásticas e molas (somente contra rompimento);
- **24 meses:** partes estruturais em madeira ou metal submetidas a esforços.

Para solicitar a garantia, forneça o número de série, a nota fiscal, o FIPO e o modelo do equipamento. A garantia será invalidada se:

- O uso não for exclusivo para exercícios definidos pelo Método Pilates;
- Peças, ferramentas e substâncias não indicadas no manual forem utilizadas;
- As orientações do manual não forem seguidas, incluindo inspeções, revisões e manutenções;

- A instalação não observar as especificações do manual;
- Houve uso inadequado, modificações no produto ou conserto por pessoas não autorizadas;
- Houver sinais de violação do produto, como remoção ou adulteração do número de série ou peças não originais.

A garantia não cobre:

- Instalação realizada por entidades não autorizadas;
- Instalação de peças ou acessórios não originais;
- Custo com mão de obra e materiais para preparação do local de instalação;
- Falhas devido ao desconhecimento do usuário sobre o método pilates;
- Serviços de manutenção e limpeza;
- Falhas causadas por falta de limpeza ou objetos estranhos;
- Transporte do produto até o local de instalação;
- Danos causados por remoção, manuseio inadequado ou eventos naturais (como oxidação, chuva, inundações, etc.);
- Custos de inspeção e diagnóstico em casos de falhas não cobertas pela garantia;
- Deslocamento do técnico para atendimentos fora da área de cobertura da assistência técnica.

Peças desgastadas pela utilização natural, como as alças, estofados, molas e mosquetões, também não são cobertas.

Considerações gerais:

- A MetaLife não autoriza terceiros a assumir responsabilidades além das descritas no termo de garantia;
- A MetaLife pode alterar os produtos sem aviso prévio, e este termo é válido apenas no Brasil;
- Guarde o termo de garantia, manual e nota fiscal;
- Envie fotos e vídeos para agilizar o atendimento, evitando o envio do produto à fábrica;
- O proprietário do equipamento é responsável por danos a terceiros devido ao uso inadequado, instalação incorreta ou falta de manutenção.



Linha
infinity | 

 **MetaLife**

Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda
Rodovia BR 280, 2.147 - Galpão 1 - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000